

Hướng dẫn sử dụng túi truyền áp lực

Model: PIB500/PIB1000

Của hãng Merit Medical

Xuất xứ: Mỹ

Kiểm tra trước khi sử dụng:

1. Kiểm tra kết nối của bóng với van thoát khí vào ống dẫn
2. Kiểm tra khóa van

Các bước thực hiện như sau:

1. Đưa túi chất lỏng vào giữa túi lưới và túi áp lực
2. Trượt móc vòng qua đầu túi và treo sao cho miệng túi hướng xuống dưới
3. Bơm: đóng van trên bóng bơm, bơm cho đến chỉ định thích hợp
4. Xoay khóa để áp lực luôn được duy trì đúng giá trị
5. Xả hơi bằng cách mở van trên bơm

Các chú ý:

- Cần giữ thiết bị sạch sẽ, đảm bảo rằng các kết nối phù hợp với hướng dẫn sử dụng của bộ theo dõi hay thiết bị phù hợp. cần kiểm soát và theo dõi cẩn thận.
- Trước khi can thiệp, mọi thiết bị được sử dụng cho quá trình cần được kiểm tra để đảm bảo khả năng hoạt động tốt

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



GIÁM ĐỐC
Hoàng Mạnh Cường