

CÔNG TY TNHH TBYT Y NHẬT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY IN UP-25MD

**Phần 1 : Các phím chức năng (tính từ trái sang phải theo lần lượt ở mặt trước của máy in)
(Tham khảo hình ở trang số 8 của HDSĐ bằng tiếng anh trong đĩa CD cung cấp kèm)**

- 1) PRINT : Trong khi máy đang in, đèn sẽ sáng để báo hiệu
- 2) ALARM : đèn sẽ sáng báo hiệu có lỗi xuất hiện trong quá trình in (ví dụ như lỗi kẹt giấy)
- 3) Remote sensor : bộ phận cảm biến khi sử dụng dây remote
- 4) Màn hình hiển thị LCD : ở màn hình sẽ hiển thị màu xanh nếu máy hoạt động bình thường. Nếu có lỗi xuất hiện tin báo lỗi sẽ xuất hiện trên màn hình
- 5) Phím Menu : ấn phím để hiển thị menu hoặc quay trở về màn hình bình thường từ hệ thống menu
- 6) Phím Display
- 7) Các phím mũi tên : sử dụng để chọn mục menu và thay đổi các thông tin cài đặt
- 8) Phím STOP/CLEAR: khi máy đang trong quá trình in, phím này được sử dụng với chức năng dừng in. Khi máy không trong quá trình in, phím này được sử dụng với chức năng xóa, nhấn phím này sẽ xóa tất cả ảnh đã được lưu
- 9) Phím MULTI PICTURE : tham khảo phím chức năng này ở trang 29 HDSĐ tiếng Anh của đĩa CD cung cấp kèm
- 10) Phím PRINT QTY : nhấn phím để chọn số bản ảnh muốn in ra của một ảnh, số lượng tối đa có thể lên đến 9 bản copy
- 11) Phím CAPTURE : nhấn phím để lưu lại hình ảnh vào bộ nhớ để in
- 12) Phím Print : nhấn phím này để in ảnh được lưu trong bộ nhớ
- 13) Công tắc bật/ tắt máy : nhấn nút công tắc để tắt hoặc bật máy,
- 14) Tray light : tham khảo trang 61 ở HDSĐ tiếng Anh
- 15) khay để giấy : để giấy ở trong khay, khay mực để ở khay phía trên
- 16) Nhấn phím này để đưa khay giấy ra
- 17) Phím EXEC nhấn phím để xác nhận lại thông tin cài đặt ở MENU
- 18) Phím MEMORY PAGE : nhấn phím để chọn ảnh được lưu trong bộ nhớ để in (tham khảo thêm ở trang 25,28,37 của HDSĐ tiếng Anh)
- 19) Phím SOURCE/MEMORY

Bên trong trong bảng cửa khay mực gồm có (tham khảo hình vẽ ở trang 9 HDSD tiếng Anh)

- 1) Công tắc bật tắt máy
- 2) Khay để băng mực
- 3) Nút “Dial” dùng để lấy giấy ra mỗi khi xuất hiện lỗi kẹt giấy ở bên trong (tham khảo thêm trang 74 HDSD tiếng Anh)
- 4) Media switch lever

Mặt sau của máy in gồm : lần lượt từ trái sang phải (tham khảo hình ở trang 10 HDSD tiếng Anh trong đĩa CD cung cấp kèm)

- 1) Equipotential ground terminal connector
- 2) Công tắc NTSC/PAL
- 3) Cổng kết nối VIDEO IN/VIDEO OUT : tham khảo hình ảnh trang 13 HDSD tiếng Anh
- 4) Cổng kết nối INPUT (RGB/YPbPr/SYNC video signal input)
- 5) Cổng kết nối OUTPUT (RGB/YPbPr/SYNC video signal output)
- 6) Cổng kết nối RS232
- 7) Cổng kết nối nguồn điện
- 8) Cổng kết nối Remote 2
- 9) Cổng kết nối Remote 1
- 10) Cổng kết nối S-Video in/ S-Video out

Phần 2 : Chú ý :

- 1) Tắt tất cả các nguồn điện trước khi kết nối máy in với các thiết bị khác
- 2) Kết nối nguồn điện sau cùng
- 3) Tham khảo cách lắp đặt băng mực, giấy vào khay ở trang 15,16, 17,18,19 HDSD tiếng Anh
- 4) Tham khảo cách chọn tín hiệu đầu vào cho máy in ở trang 19, 20 HDSD tiếng Anh

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

