

## CÔNG TY TNHH TBYT Y NHẬT

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY IN UP-D25MD

**Phần 1 : Các phím chức năng ( tính từ trái sang phải theo lần lượt ở mặt trước của máy in)  
(Tham khảo hình ở trang số 10 của HDSĐ bằng tiếng anh trong đĩa CD cung cấp kèm)**

- 1) PRINT : Trong khi máy đang in, đèn sẽ sáng để báo hiệu
- 2) Màn hình hiển thị LCD : ở màn hình sẽ hiển thị màu xanh nếu máy hoạt động bình thường. Nếu có lỗi xuất hiện tin báo lỗi sẽ xuất hiện trên màn hình
- 3) ALARM : đèn sẽ sáng báo hiệu có lỗi xuất hiện trong quá trình in (ví dụ như lỗi kẹt giấy)
- 4) Phím Menu : ấn phím để hiển thị menu hoặc quay trở về màn hình bình thường từ hệ thống menu
- 5) Các phím mũi tên : sử dụng để chọn mục menu và thay đổi các thông tin cài đặt
- 6) Phím STOP: khi máy đang trong quá trình in, phím này được sử dụng với chức năng dừng in.
- 7) Phím EXEC : phím này dùng để xác nhận lại thông tin mới được cài đặt ở menu
- 8) Công tắc bật/ tắt máy : nhấn nút công tắc để tắt hoặc bật máy,
- 9) khay để giấy : để giấy ở trong khay, khay mực để ở khay phía trên
- 10) Dấu tam giác ở trước khay giấy , nhấn dấu này để đưa khay giấy ra

**Bên trong trong bảng cửa khay mực gồm có (tham khảo hình vẽ ở trang 10 HDSĐ tiếng Anh)**

- 1) Công tắc bật tắt máy
- 2) Khay để băng mực
- 3) Nút “Dial” dùng để lấy giấy ra mỗi khi xuất hiện lỗi kẹt giấy ở bên trong (tham khảo thêm trang 74 HDSĐ tiếng Anh)
- 4) Media switch lever

**Mặt sau của máy in gồm : lần lượt từ trái sang phải (tham khảo hình ở trang 11 HDSĐ tiếng Anh trong đĩa CD cung cấp kèm)**

- 1) Chốt giữ cáp USB : giúp giữ cáp USB không bị xô dịch khỏi cổng kết nối USB với máy in
- 2) Cổng kết nối USB
- 3) Cổng kết nối nguồn điện
- 4) Equipotential ground terminal connector

**Phần 2 : Chú ý :**

- 1) Tắt tất cả các nguồn điện trước khi kết nối máy in với các thiết bị khác

- 2) Kết nối nguồn điện sau cùng
- 3) Tham khảo cách lắp đặt băng mực, giấy vào khay ở trang 14,15,16,17 HDSD tiếng Anh

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**

