

CÔNG TY TNHH TBYT Y NHẬT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY IN UP-X898MD

Phần 1 : Các phím chức năng (tính từ trái sang phải theo lần lượt ở mặt trước của máy in) (Tham khảo hình ở trang số 9 của HDSĐ bằng tiếng anh trong đĩa CD cung cấp kèm)

- 1) Công tắc bật/ tắt máy : nhấn nút công tắc để bật máy, khi đó đèn phía sau màn hình LCD sẽ bật sáng.
Chú ý: khi tắt máy hoặc nguồn điện cung cấp cho máy chập chờn, phải chờ 5 giây sau khi tắt máy mới được bật lại máy
- 2) Màn hình hiển thị LCD : đèn ở màn hình sẽ hiển thị màu xanh nếu máy hoạt động bình thường. Nếu có lỗi xuất hiện, đèn màn hình sẽ chuyển sang màu cam và tin báo lỗi sẽ xuất hiện trên màn hình
- 3) Cần điều chỉnh Menu máy : sử dụng trong trường hợp cần điều khiển và cài đặt lại thông tin menu trong máy
- 4) Nút điều khiển “Contrast” được sử dụng để điều khiển trực tiếp độ tương phản và rõ nét hình ảnh được in ra ở máy in
- 5) Nút điều khiển “Bright”: được dùng để điều khiển trực tiếp độ sáng tối của hình ảnh được máy in in ra
- 6) Nút “FEED” , khi ấn và giữ nút này máy sẽ tự động thả giấy ra (dùng trong trường hợp phần giấy ở bên ngoài dao cắt giấy quá ngắn, có thể dùng nút này để máy tự động thả thêm giấy mà không cần phải mở khay giấy để điều chỉnh độ dài phần giấy bên ngoài)
Khi máy đang in, ấn phím này để xóa lệnh in
- 7) Nút “COPPY” , nhấn nút này để in thêm một lần nữa bản in vừa in xong, chỉ có thể in một bản copy một lần mỗi khi ấn nút “COPPY”
- 8) Nút “ PRINT”, nhấn nút “PRINT” để in hình ảnh hiện tại thể hiện trên màn hình kết nối với máy in .
Hình ảnh này sẽ được lưu vào bộ nhớ khi nhấn nút “PRINT”
- 9) Nút “OPEN”, nhấn nút này để mở cửa khay cho giấy in vào, nếu máy in đang in, nhấn nút này sẽ xóa lệnh in
- 10) Dao cắt giấy : để cắt giấy mỗi khi một hình ảnh được in ra

Mặt sau của máy in gồm : lần lượt từ trái sang phải (tham khảo hình ở trang 10 HDSĐ tiếng Anh trong đĩa CD cung cấp kèm)

- 1) “VIDEO input connector- BNCtype” kết nối qua cáp tín hiệu với đầu ra của thiết bị máy in kết nối
- 2) “VIDEO output connector- BNCtype” kết nối qua cáp tín hiệu với đầu vào của màn hình thiết bị máy in kết nối
- 3) “Remote connector” chức năng này dùng để điều khiển từ xa
- 4) “USB conector-type A”
- 5) Đèn “USB conector – type A”
- 6) “USB conector-type B”
- 7) AC IN conector : đầu vào nguồn điện của máy phải đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật của máy in
- 8) Equipotential terminal

Phần 2 :

Chú ý :

- Tắt nguồn điện các thiết bị trước khi kết nối với nhau
- Kết nối nguồn điện sau cùng sau khi đã hoàn tất kết nối các thiết bị với nhau
- Giấy in dùng cho máy in : UPP 110S, UPP 110HD, UPP 110 HG
- Nhấn nút bật tắt máy để mở máy, khi không có giấy trong máy in, màn hình sẽ hiển thị “EMPTY”
- Nhấn nút OPEN để mở khay để giấy in
- Khi để giấy in vào khay lưu ý để úp cuộn giấy xuống (tham khảo hình vẽ trang14-HDSĐ tiếng Anh) và để chừa khoảng 15-20cm giấy
- Để cuộn giấy vào khay thẳng thắn, không xộc xệch

Khuyến cáo : Người sử dụng khi mua giấy in kết quả siêu âm dùng cho máy in phải mua hàng chính hãng của công ty, không mua hàng trôi nổi và không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

