

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY HÀN DÂY TÚI MÁU

Model: SE330, SE340, SE370, SE530, SE540, SE640



MỤC LỤC

1. Giới thiệu
2. Hướng dẫn sử dụng
3. Lưu ý khi sử dụng



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hoàng Luân



1. Giới thiệu:

- Thiết bị được sử dụng để hàn dây túi máu
- Thiết bị sử dụng công nghệ Rapid seal II
- Nhiệt độ đủ tiêu chuẩn không làm đường ống hở do không đủ nhiệt độ hoặc làm đứt rời đường dây do nhiệt độ quá cao.
- Thời gian hàn 0,5 – 1,2 giây
- Đèn báo hiển thị màu các quá trình.
- Thiết bị nhỏ gọn tiện lợi, dễ dàng di chuyển.
- Sử dụng nguồn cấp AC hoặc Pin

2. Hướng dẫn sử dụng:

a. Bộ phận hàn cố định:

- Lắp tấm chắn bảo vệ vào bộ phận hàn.
- Bật công tắc nguồn
 - + Đèn báo hiển thị màu xanh lá

Chú ý: Nếu đèn hiển thị màu vàng, chỉ ra rằng tấm chắn bảo vệ đã tháo hoặc gắn không đúng. Kiểm tra và lắp lại. Máy không hoạt động nếu không có nắp bảo vệ.
- Đặt đường dây vào bộ phận hàn.
 - + Đầu hàn sẽ tự động ép đường ống và ra nhiệt để hàn đường dây
 - + Đèn báo hiển thị màu đỏ
- Trong khoảng 0,5 – 1,2 giây đầu hàn sẽ quay trở lại.
 - + Đèn báo hiển thị màu xanh lá
 - + Một mối hàn được tạo trên đường dây.
- Đưa ống khỏi bộ phận hàn và kiểm tra.

b. Bộ phận hàn cầm tay:

- Lắp tấm chắn bảo vệ vào bộ phận hàn.
- Bật công tắc nguồn
 - + Đèn báo hiển thị màu xanh lá

Chú ý: Nếu đèn hiển thị màu vàng, chỉ ra rằng tấm chắn bảo vệ đã tháo hoặc gắn không đúng. Kiểm tra và lắp lại. Máy không hoạt động nếu không có nắp bảo vệ.
- Đặt đường dây vào bộ phận hàn cầm tay.
 - + Ta đưa dây vào sau đó nắm chặt thanh đòn. Lúc này đầu hàn sẽ được đẩy ra và ép đường ống, ra nhiệt. Nắm đến lúc quá trình hàn hoàn thành.
 - + Lúc này đèn báo hiển thị màu đỏ
- Trong khoảng 0,5 – 1,2 giây.
 - + Đèn báo hiển thị màu xanh lá
 - + Ta nhả thanh đòn và đưa đường ống ra ngoài.

62236
ÔNG
Ổ PHÁ
COMT
TUAN

12



GENESIS™
WITH RAPID SEAL II TECHNOLOGY

- + Một mối hàn được tạo trên đường dây.
- Đưa ống khỏi bộ phận hàn và kiểm tra.

3. Lưu ý khi sử dụng:

- Không được sử dụng Model SE340 vs SE540 trong môi trường bệnh nhân, phạm vi > 1,5m
- Không đặt thiết bị ở vị trí chật hẹp làm ảnh hưởng đến hệ thống làm mát bằng quạt thông gió ở mặt sau.
- Không hàn đường ống có dịch trên bề mặt hoặc đường ống trong tình trạng ẩm ướt
- Không sử dụng để hàn dây có đường kính > 6mm
- Nhiệt độ bảo quản: -20 – 70°C.



Handwritten signature