

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
SẢN PHẨM DUNG DỊCH VỆ SINH TAI OVIX**



1. THÀNH PHẦN

Sản phẩm dung dịch vệ sinh tai OVIX gồm các thành phần cấu tạo:

1. Lọ nhỏ : được làm bằng nhựa PE, cấu tạo gồm 03 bộ phận: Nắp lọ, thân lọ, ống dẫn.
2. Dung dịch vệ sinh tai được chứa trong lọ nhỏ với công thức Điều chế cho 10ml thành phẩm:

TT	Thành phần	Khối lượng/10ml
1.	Dịch chiết thảo dược nhất chi hoa	0,5g
2.	Nano bạc (Ag+)	50 ppm
3.	Cồn Ethanol 20°	Vừa đủ 10ml

2. CÔNG DỤNG

- Hỗ trợ sát khuẩn, kháng viêm, phòng ngừa và làm giảm các triệu chứng viêm tai giữa.

3. CÁCH DÙNG

- Mở nắp bảo vệ theo chiều thẳng đứng.
- Đặt nhẹ nhàng ống dẫn vào thành tai.
- Nhỏ ngày 3 lần, mỗi lần 3 giọt mỗi tai.
- Để dung dịch tiếp xúc với ốc tai 5 phút sau đó lau sạch bằng bông.
- Lau sạch, khô ống dẫn, đậy nắp bảo vệ.

4. CẢNH BÁO THẬN TRỌNG

- Trẻ em sử dụng phải có người lớn hướng dẫn;
- Đôi khi việc nhỏ có thể khiến trẻ giật mình;
- Chỉ sử dụng cho trẻ em từ trên 3 tháng tuổi.

5. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của dung dịch vệ sinh tai.

6. BẢO QUẢN

- Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nguồn nhiệt.
- Sau khi sử dụng đậy kín nắp.

CÔNG TY TNHH PHARMA NHÂN PHÚ

Địa chỉ: 8/9/77 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0888225238

Website: www.ovix.vn

Sản xuất tại: Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Dược phẩm Hồng Phát -
Thôn Thăng Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

