

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Dung dịch vệ sinh mũi NASAL CARE HG For Adults



Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế:

Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ DOLEXP HAR

Địa chỉ: Lô C2, KCN Đại An, Thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương.

Hải Dương, ngày 25 tháng 06 năm 2019

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Dung dịch muối biển dạng phun sương phân tán đều trên niêm mạc mũi giúp vệ sinh, làm sạch, ngăn ngừa vi khuẩn, virus, hỗ trợ phòng ngừa và điều trị các bệnh lý mũi hay gặp như chảy mũi, ngạt mũi, viêm xoang.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Hộp gồm 01 bình xịt đựng trong hộp giấy. Bên trong bình xịt chứa dung dịch vệ sinh mũi.
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Sử dụng hàng ngày để vệ sinh mũi, loại bỏ chất nhầy, bụi bẩn đọng lại ở xoang, mũi, giúp thông thoáng mũi để thở và mang lại cảm giác dễ chịu sau khi sử dụng.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	- Đưa nhẹ đầu vòi phun sương vào từng bên mũi. - Ấn nhẹ, dứt khoát đầu vòi xịt vào khoang mũi, xịt đủ thể tích để dung dịch kếp theo chất nhầy, bụi bẩn ra ngoài. - Lau sạch đầu vòi sau khi sử dụng. Xịt vệ sinh ngày 4 đến 6 lần khi đang có các bệnh lý về mũi. Xịt ngày 2 lần để vệ sinh và hỗ trợ phòng ngừa các bệnh về mũi.
1.5	Chống chỉ định	Đị ứng với bất kỳ thành phần nào của dung dịch.
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không sử dụng các dung dịch khác để thay thế khi dung dịch vệ sinh mũi trong chai hết.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có

2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): <i>Không có</i>
3	Chi định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): <i>Không có</i>
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế; <i>Không có</i>

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Danh Long