



# CÔNG TY TNHH TM TBYT HOÀNG THỊNH PHÁT

11 Phạm Quý Thích – Phường Tân Quý- Quận Tân Phú – TP. Hồ Chí Minh

Tel: 08.35592683-35592684 Fax: 08.35591955

Email : [htpmedical@hoangthinhphat.vn](mailto:htpmedical@hoangthinhphat.vn) - [htpmedical@gmail.com](mailto:htpmedical@gmail.com)

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỤNG CỤ PHẪU THUẬT

1. Kiểm tra kỹ dụng cụ trước khi sử dụng có bị hư hỏng hay lỗi sản phẩm
2. Tiệt trùng dụng cụ trước khi sử dụng. Dụng cụ nên được tiệt trùng bằng phương pháp tiệt trùng nhiệt ẩm ở 132 độ C trong 15 phút. Nhiệt độ tiệt trùng không vượt quá 140 độ C
3. Sau khi tiệt trùng không dùng tay chạm vào đầu dụng cụ
4. Phải sử dụng đúng tính năng của từng loại dụng cụ, đúng cho từng mục đích sử dụng
5. Người sử dụng dụng cụ phải là người có kiến thức y khoa và được đào tạo về cách sử dụng dụng cụ phẫu thuật
6. Khi sắp xếp dụng cụ, phải luôn đặt các dụng cụ nặng hơn bên dưới và dụng cụ nhẹ hơn bên trên và đặt dụng cụ trên một miếng vải hoặc khăn.
7. Không sử dụng dầu để bôi trơn dụng cụ, chỉ sử dụng các chất bôi trơn có thể hòa tan trong nước
8. Không để các chất có tính bám dính lên trên dụng cụ vì sẽ làm hỏng bề mặt sản phẩm và có thể làm gỉ hoặc mòn sản phẩm
9. Sau khi sử dụng phải vệ sinh lại dụng cụ bằng nước cất. Nước chứa clo có thể làm hỏng dụng cụ. Sau đó ngâm dụng cụ trong dung dịch tiệt trùng, không ngâm dụng cụ quá lâu hơn thời gian cần thiết. Sau khi tiệt trùng nên rửa lại với nước ấm để loại bỏ hóa chất còn bám lại để ngăn dụng cụ bị phai màu hoặc mòn
10. Không sử dụng các chất tẩy rửa có tính ăn mòn. Nên sử dụng dung dịch khử trùng có độ  $ph=7$
11. Không sử dụng bàn chải cứng để vệ sinh dụng cụ
12. Đảm bảo dụng cụ phải khô ráo hoàn toàn trước khi bảo quản
13. Phải luôn tiệt trùng dụng cụ trước khi sử dụng
14. Sau 3-4 lần sử dụng, dụng cụ nên được thay mới
15. Bảo quản dụng cụ ở nơi khô ráo



Giám Đốc  
Phạm Thị Thùy Trang