

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Miếng dán hạ sốt K/S Cooling Sheets for kids 16 Sheets

Thành phần: Có thành phần cơ bản là Hydrogel và cấu tạo gồm 3 lớp: lớp hấp thụ nhiệt, lớp tuyền nhiệt và lớp khuếch tán nhiệt. Hạ sốt và giảm đau nhờ cơ chế hấp thụ và khuếch tán nhiệt nhanh chóng của miếng dán. Thành phần không có bạc hà và chất gây kích ứng da. Miếng dán K/S Cooling Sheets không có thuốc.

Sản phẩm được chế tạo với công nghệ cao tại Nhật Bản, được tổ chức OMETTA - Nhật Bản chứng nhận về chất lượng và được bán rộng rãi trên nước Nhật và trên toàn thế giới. Được tổ chức K-SELECT chứng nhận hàng chuẩn nội địa Nhật Bản.

Công dụng: Hiệu quả làm lạnh và mát dịu liên tục trong 10 giờ liền.

Đặc tính:

- Hạ nhiệt cấp tốc cho trẻ.
- Không ảnh hưởng đến da, khả năng dính tốt.
- Dán ở nách, bẹn và háng trẻ đều không ảnh hưởng gì.
- Những nơi sử dụng hiệu quả nhất: Trán, cổ và má của trẻ.

Cách sử dụng:

- Gỡ lớp ni lông ở phía sau ra và dán mặt còn lại vào vị trí muốn làm hạ nhiệt. Tùy thuộc vào vị trí dán và độ lớn có thể cắt ra cho phù hợp.
- Có thể bảo quản trong tủ lạnh ở 5 độ C là hợp lý nhất và tuyệt đối không được cho đông đá. Nếu để đông đá hiệu quả có thể cao hơn nhưng nó sẽ làm ảnh hưởng làn da của trẻ nhỏ.
- Miếng dán hạ sốt có thể sử dụng được liên tục trong 10 tiếng đồng hồ. Tùy thuộc vào nhiệt độ của cơ thể. Miếng dán có thể có hiệu quả ngắn hơn tùy vào nhiệt độ cơ thể lúc đó. Khi cảm thấy không còn hiệu quả nữa thì phải thay miếng dán mới. Khi miếng dán khô thì mình rửa lại bằng nước để phần dán không bị bết bởi cao dán.

Chú ý cách bảo quản và sử dụng miếng dán hạ sốt:

- Những người mẫn cảm với thuốc hoặc da dễ bị dị ứng thì không nên sử dụng cao dán. Không dán vào những vết thương, vết bỏng và những chỗ da đang bị tổn thương và vùng mắt.
- Sau khi sử dụng nếu bị nổi mẩn ngứa hay da có dấu hiệu lạ thì nên ngừng sử dụng nó. Cần chú ý khi trẻ sử dụng và cho vào miệng, mắt, mũi...
- Khi da bị mồ hôi và ướt nếu dán vào sẽ dễ bị rơi vì thế nên lau khô trước khi dán vào phần muốn dán.
- Miếng dán chỉ sử dụng 1 lần không nên bảo quản để tái sử dụng.
- Miếng cao dán không phải là thuốc chữa bệnh. Để nơi khô ráo và tránh ánh nắng mặt trời. Bảo quản tránh xa tầm tay trẻ em. Sau khi mở và sử dụng chưa hết thì phải gấp lại không cho tiếp xúc với không khí bên ngoài.
- Miếng dán khuyến dùng cho trẻ từ 2 tuổi, dưới 2 tuổi dùng theo chỉ định của bác sĩ

Đóng gói: 16 +2 miếng (9 gói) trong 1 hộp.



Nguyễn Thị Hải Lý