




GIÁM ĐỐC
Lưu Văn Sơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
GIƯỜNG ĐIỆN ĐA NĂNG CHỖ BỆNH NHÂN
HÃNG SẢN XUẤT: PARAMOUNT BED INDONESIA
MODEL: PA-6428
XUẤT XỨ: INDONESIA

PEDAL ĐIỀU KHIỂN BÁNH XE

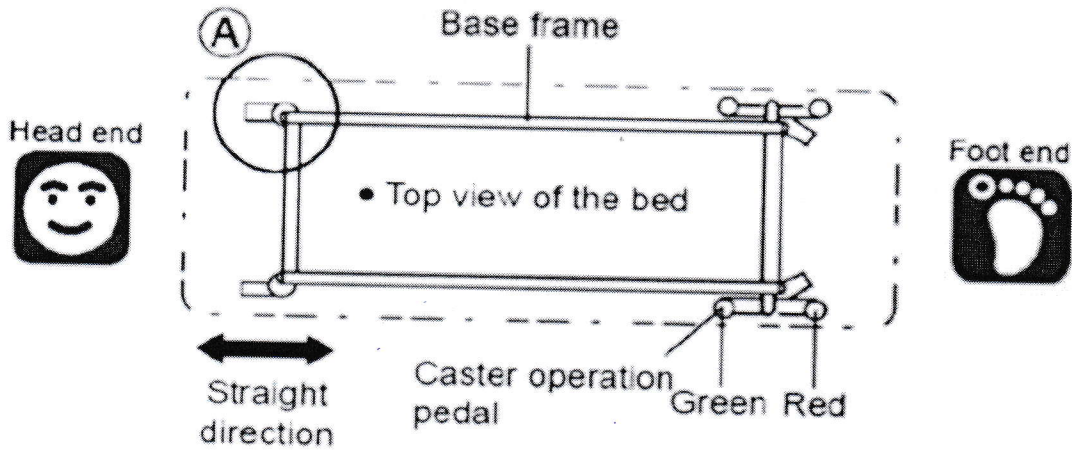


- Pedal điều khiển bánh xe được gắn tại vị trí 2 bánh xe phía chân. Có thể điều chỉnh bằng thanh ngang giữa 2 bánh xe phía đầu khi cần thiết.
- Hai đầu Pedal được đánh dấu màu đỏ và màu xanh.
- 01 bánh xe ở phía đầu giường là bánh xe dẫn hướng thẳng.

VỆ SINH GIƯỜNG HÀNG NGÀY

- (1) Bước 1: Lau chùi vệ sinh giường bằng một miếng vải sạch đã vắt ráo sau khi ngâm trong dung dịch vệ sinh.
- (2) Bước 2: Lau chùi vệ sinh giường bằng một miếng vải sạch đã vắt ráo sau khi ngâm trong nước sạch không có dung dịch vệ sinh.
- (3) Bước 3: Lau chùi vệ sinh giường bằng một miếng vải sạch và khô.

LƯU Ý:

- (1) Không sử dụng dung dịch vệ sinh dễ bay hơi (như dạng xịt hơi, benzen hoặc xăng) và cresol. Điều này sẽ có thể gây ra sự đổi màu hoặc suy giảm đặc tính vật liệu của giường.
- (2) Phải luôn luôn pha loãng chất tẩy rửa được sử dụng như quy định dưới đây

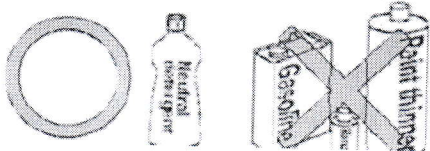

- 0.05% - 0.2% benzalkonium chloride (e.g. Osvan)
- 0.05% - 0.2% benzethonium chloride (e.g. Hiamine)
- 0.05% chlorhexidine gluconate (e.g. Hibitane)
- 0.02% - 0.05% sodium hypochlorite (e.g. Milton)