

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Phải sử dụng đúng loại dụng cụ cho từng mục đích sử dụng
2. Không áp dụng các chất có tính bám dính lên trên dụng cụ vì sẽ làm hỏng bề mặt sản phẩm và có thể làm phai màu, gỉ hoặc mòn;
3. Không được chạm vào đầu dụng cụ. Các dụng cụ sắc, nhọn có thể làm bị thương. Người sử dụng dụng cụ phải là người có kiến thức và được đào tạo về cách sử dụng dụng cụ phẫu thuật;
4. Khi sắp xếp dụng cụ, phải luôn đặt các dụng cụ nặng hơn bên dưới và dụng cụ nhẹ hơn bên trên và đặt dụng cụ trên một miếng vải hoặc khăn hoặc tấm Silicon chống hỏng dụng cụ;
5. Không sử dụng dầu để bôi trơn dụng cụ; chỉ sử dụng các chất bôi trơn có thể hoà tan trong nước;
6. Không ngâm dụng cụ quá lâu hơn mức cần thiết trong dung dịch tiệt trùng. Sau khi tiệt trùng, nên rửa lại bằng nước ấm để loại bỏ tất cả các vết tích của hóa chất để ngăn dụng cụ bị phai màu hoặc mòn;
7. Phải bảo quản dụng cụ ở nơi khô ráo;
8. Phải luôn tiệt trùng dụng cụ trước mỗi lần sử dụng;
9. Phải bôi trơn dụng cụ sau khi làm sạch bằng chất bôi trơn dụng cụ có thể hòa tan trong nước;
10. Không sử dụng các chất tẩy rửa có tính ăn mòn. Nên sử dụng dụng dịch khử trùng với độ pH = 7;
11. Không sử dụng các chất vệ sinh có tính bám dính và bàn chải có lông cứng khi làm sạch dụng cụ;
12. Chỉ sử dụng nước cất để rửa sạch dụng cụ. Nước có chứa clo hoặc các chất ăn mòn có thể làm hỏng hoặc phá hủy dụng cụ;
13. Phải kiểm tra dụng cụ trước khi sử dụng để phòng dụng cụ bị hỏng;
14. Phải chú ý đặc biệt đến các dụng cụ vi phẫu vì các đầu dụng cụ có thể dễ dàng bị hỏng khi tiếp xúc với các dụng cụ khác;
15. Đảm bảo tất cả các dụng cụ phải khô hoàn toàn trước khi bảo quản;
16. Phải kiểm tra thành phần cứng của nước được sử dụng trong nồi hấp tiệt trùng;
17. Dụng cụ có thể tiệt trùng bằng phương pháp hấp ướt ở 132⁰C trong 15 phút trước khi sử dụng để phẫu thuật. Nhiệt độ tiệt trùng không được vượt quá 137⁰C;

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



GIÁM ĐỐC

Hà Mạnh Hoàng