

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### Găng tay latex có bột

#### 1. Đặc tính sản phẩm:

- Không tiết trùng
- Dùng một lần
- Thuận cả hai tay
- Màu trắng tự nhiên

Sản phẩm có bột đã được phủ bột báp bên trong (an toàn theo tiêu chuẩn US FDA), găng có độ mềm dai cao giúp việc đeo găng dễ dàng, mùi hương dễ chịu cho người sử dụng.

Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485

#### 2. Nguồn gốc sản phẩm:

Được sản xuất tại MALAYSIA









#### 3. Nguyên liệu chính:

Mủ cao su tự nhiên

#### 4. Đặc tính kỹ thuật:

Đặc tính	Tiêu chuẩn ASTM	PROFESSIONAL
Chiều dài (mm)	Min 230	235 - 240
Độ dài cổ tay (mm)	Không quy định	0.06 - 0.07 mm
Độ dài lòng bàn tay (mm)	Min 0.08 mm	0.07 - 0.09 mm
Độ dài ngón tay (mm)	Min 0.08 mm	0.09 - 0.1 mm
Lực kéo (mpa)	Min 18 mpa	20 - 22 mpa
Lực đàn hồi (%)	Min 650%	700 - 750%
Hàm lượng bột	Max 10mg/dm <sup>2</sup>	Max 5 - 7mg/dm <sup>2</sup>
Hàm lượng protein chiết khấu	Max 200ug/g	Max 200ug/g

5. Các biểu tượng trên nhãn dán, bao bì:


Kí hiệu	Ghi chú
	Tránh ánh sáng trực tiếp
	Giữ nơi khô ráo
	Bảo quản ở nhiệt độ dưới 38°C
	Cao su tự nhiên
	Sử dụng một lần
	Sản phẩm đạt tiêu chuẩn liên minh Châu Âu
	Hạn sử dụng
	Nhà sản xuất

6. Mục đích sử dụng:

Găng tay cao su dùng thuận cả hai tay, dùng trong các hoạt động y khoa như khám, chữa bệnh, nha khoa, chăm sóc bệnh nhân... giúp ngăn ngừa các nguy cơ lây nhiễm bệnh trong quá trình tiếp xúc giữa bệnh nhân và các nhân viên y tế.

### 7. Hướng dẫn sử dụng:

Trước khi sử dụng găng tay, ta nên vệ sinh sạch sẽ hai tay bằng nước sạch, dung dịch tẩy rửa hoặc xà phòng có tính làm sạch và lâu khô tay để tránh bị lây nhiễm vi khuẩn hay dịch bệnh từ người dùng khi sử dụng. Xé phần răng cưa có trên mặt hộp để lấy sản phẩm đeo vào tay và sử dụng (theo mẫu đính kèm).

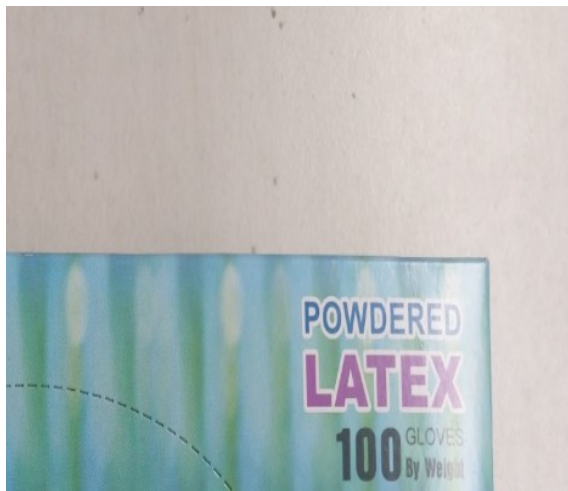

Mở tại đây

**\* Ghi chú: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa**

### 8. Cảnh báo và lưu ý:

Sản phẩm không tiệt trùng, không dùng trong các thủ thuật y tế thâm nhập chuyên sâu. Sản phẩm được làm từ cao su tự nhiên có chứa protein, có thể gây dị ứng da tay với một số trường hợp. Khi phát hiện tay bị nổi mẩn đỏ kèm theo cảm giác ngứa, lập tức ngừng sử dụng và tìm các biện pháp chăm sóc y khoa. Người dùng có thể sử dụng các sản phẩm thay thế như găng nitrile, vinyl nếu bị dị ứng với protein latex.

### 9. Bảo quản:

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp lên bao bì sản phẩm.
- Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ phòng không quá 38°C
- Nếu sản phẩm không dùng để quá hạn sử dụng có thể xảy ra các trường hợp sau: dính, đổi màu.