

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ DÂY TRUYỀN DỊCH

Giới thiệu:

Bộ dây truyền dịch được sử dụng để đưa dịch truyền và/ hoặc thuốc vào hệ tuần hoàn của cơ thể. Sản phẩm được làm từ ống nhựa chống xoắn, không có DEHP


Chiều dài ống: 150cm, 180cm, 200cm, có/không có DEHP

Bộ điều chỉnh dòng chảy được tích hợp trong bộ dây truyền dịch giúp kiểm soát lưu lượng dịch chính xác.

Lưu lượng dịch: Khoảng 20 giọt / 60 giọt tương đương với $1 \pm 0,1$ ml nước cất

Hướng dẫn sử dụng:

1. Đóng khóa chỉnh giọt.
2. Tháo nắp bảo vệ ở đầu dây truyền, sau đó cắm thẳng, sâu vào nắp chai dịch truyền.
3. Treo chai dịch truyền lên cọc truyền.
4. Mở khóa chỉnh giọt, nhỏ lượng dịch đầy 1/2 đến 2/3 bầu nhỏ giọt.
5. Cho dịch chảy qua dây truyền và kim để loại hết khí trong dây truyền và kim
6. Đóng khóa chỉnh giọt, đặt kim truyền hoặc kim luôn vào tĩnh mạch và cố định kim.
7. Kết nối dây truyền dịch với kim luôn (nếu đặt đường truyền bằng kim luôn)
8. Mở khóa chỉnh giọt từ từ, chỉnh tốc độ truyền và bắt đầu truyền dịch theo chỉ định.


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ
DƯỢC PHẨM
TÂN THÀNH
Đ. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Đắc Tuấn