



CÔNG TY TNHH TMDV Y TẾ  
**ĐÌNH GIANG**



203/7 Đường Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

“Ống Nong Hẹp Khí Quản”

Hãng/nước sx: **Tracoe/ Đức**

Model, mã hàng hóa: 820-05; 820-06; 820-07; 820-08; 820-09; 820-10; 820-12; 820-14; 820-16; 820-18

### • CÁC BƯỚC SỬ DỤNG

1. Kiểm tra kim đồng hồ kiểm soát áp lực ở vị trí 0,
2. Kết nối đồng hồ với ống nong hẹp khí quản.
3. Bơm đồng hồ theo quy định bác sĩ, khi bóng nong căng thao tác trong vòng 10s, xả bóng nong.
4. Bơm điều chỉnh áp lực bóng nong trong khoảng yêu cầu của bác sĩ với bóng mức 10 atm, hay 17atm.
5. Xả bóng nong. Rút kết nối đồng hồ với bóng nong.

### • LƯU Ý

1. Sử dụng ống nong khí quản khi có chỉ định của bác sĩ.
2. Bảo quản, sử dụng tránh trường hợp rơi, va chạm mạnh.
3. Để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân luôn bơm áp lực bóng nong cho bệnh nhân luôn ở giới hạn quy định.
4. Vệ sinh đồng hồ thường xuyên bằng gạc, khăn thấm cồn, nước rửa tay để tránh nhiễm khuẩn.
5. Khi gặp các vấn đề lỗi kỹ thuật vui lòng liên hệ nhà phân phối để được hỗ trợ.