



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### Quy định sử dụng găng:

1. Không cần mang găng trong các chăm sóc thông thường không có nguy cơ dính máu và dịch của người bệnh.
2. Thay găng ngay sau mỗi thủ thuật hoặc chăm sóc cho mỗi người bệnh.
3. Sử dụng găng riêng cho mỗi người bệnh và phải thay găng giữa các quy trình sạch và bẩn trên cùng một bệnh nhân.
4. Nghiêm cấm dùng một đọt găng để khám và chăm sóc cho nhiều người bệnh.
5. Thay găng khi găng bị rách, thủng hoặc bị châm kim.
6. Nghiêm cấm mang găng nghe điện thoại hoặc làm công việc hành chính, giấy tờ.
7. Găng sau khi sử dụng đã dính máu, dịch cơ thể hoặc các chất tiết phải hủy bỏ như chất thải y tế nguy hại.
8. Sau khi tháo găng phải rửa tay ngay.