

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AU SERIES SYSTEM WASH SOLUTION

Thông tin tiêu chuẩn bộ kit

Mã sản phẩm	Đóng gói	Thuốc thử	Bảo quản
GLAU WASH	2000 ml	AU WASH SOLUTION	2-25°C

### MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

AU Series System Wash Solution được thiết kế để làm sạch các hệ thống đo của máy phân tích hóa sinh Beckman Coulter AU Series. Dung dịch rửa được sử dụng để loại bỏ mẫu thử còn lại và các thuốc thử còn lại có trong các thành phần của hệ thống đo của máy phân tích sinh hóa.

### CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

*Chỉ dành cho chẩn đoán In Vitro - Chỉ sử dụng cho nhân viên xét nghiệm đã được đào tạo.*

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Những sai lệch so với quy trình này có thể làm thay đổi hiệu quả của xét nghiệm.

Biện pháp phòng ngừa an toàn:

Bảng dữ liệu an toàn vật liệu có sẵn theo yêu cầu. Vui lòng tham khảo MSDS để biết thông tin nguy hiểm.

Xử lý phòng ngừa

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để xử lý tất cả các thuốc thử trong phòng thí nghiệm.
- Không sử dụng các thuốc thử quá hạn sử dụng được ghi trên chai.
- Không để đông băng thuốc thử.
- Không sử dụng các thành phần cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được mô tả trong phần "Mục đích sử dụng".
- Không trao đổi nắp giữa các thành phần vì ô nhiễm có thể xảy ra và làm ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra.
- Tham khảo các yêu cầu pháp lý địa phương để xử lý chất thải an toàn.

Trong trường hợp bị hư hại nghiêm trọng đến lọ và/hoặc nắp, dẫn đến mất sản phẩm và / hoặc nhiễm bẩn: không sử dụng và liên hệ với nhà phân phối.

### THÀNH PHẦN

Sulfonic acids, C13-17-sec-alkane, sodium salts < 5%

Genapol 1 - 5 %

Sodium hydroxide 1%.

### CHUẨN BỊ THUỐC THỬ VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH

Thuốc thử sẵn sàng sử dụng.

Ổn định đến ngày hết hạn khi được bảo quản ở nhiệt độ trên nhãn sản phẩm.

### QUY TRÌNH

Tham khảo hướng dẫn vận hành máy phân tích.

Nhà sản xuất: GLENBIO LTD.

10 Kilbegs Rd, Antrim, Co Antrim, BT41 4NN, UK



GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Thị Phương Thảo*