



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dung dịch dùng trong kỹ thuật dòng chảy tế bào

Mục đích sử dụng:

Dung dịch dùng để cố định, nhuộm tế bào và giúp kháng thể đi vào bên trong tế bào mà không làm thay đổi cấu trúc tế bào.

Hướng dẫn sử dụng

- 1) Sản phẩm gồm 2 dung dịch A và B
- 2) Tế bào sẽ được ủ trong dung dịch A trong 15 phút.
- 3) Rửa sạch tế bào sau đó ủ với dung dịch B và các kháng thể huỳnh quang.

Cảnh báo và thận trọng

Có khả năng gây ung thư, kích ứng hô hấp

Gây kích ứng mắt và da với những người nghiêm trọng.

Sản phẩm không dùng để uống.

Thao tác trong phòng sạch vô trùng với quần áo, găng tay bảo hộ