

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE

Lô C6-2, đường D2, KCN Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, Củ Chi, TP.HCM

GEL BÔI TRƠN RUNWAY

1. GIỚI THIỆU CHUNG

- Gel bôi trơn RUNWAY được sản xuất tại Công ty cổ phần Ellie với công nghệ hiện đại, giúp dễ dàng hơn trong quan hệ tình dục.
- Gel đã được kiểm soát vi sinh vật có hại, không gây kích ứng.
- Gel trong suốt, dễ dàng làm sạch (rửa hoặc lau) sau khi sử dụng.
- Gel bôi trơn RUNWAY được sử dụng trong quan hệ tình dục, có tác dụng bôi trơn, bổ sung lượng chất nhờn tự nhiên, tăng độ ẩm của âm đạo, khắc phục chứng khô âm đạo khi cơ thể không tiết đủ chất nhờn. Sản phẩm phù hợp cho những người cơ địa bị khô, ít chất nhờn do bị stress, mệt mỏi, thời kỳ mãn kinh.

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Mở bao bì sản phẩm, ấn đầu chai xuống, lấy lượng gel vừa đủ thoa đều lên bộ phận sinh dục hoặc bao cao su. Có thể sử dụng cho cả nam và nữ.
- Sau khi dùng, gel dễ dàng rửa sạch và không lưu lại thành phần nào trong cơ thể.
- Kiểm tra hạn dùng trên sản phẩm, không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng hoặc quá 30 ngày sau khi mở nắp sản phẩm.
- Lắc đều trước khi sử dụng.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

4. BẢO QUẢN

- Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

5. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

- Tránh tiếp xúc với mắt, nếu bị kích ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm, ngưng sử dụng.
- Kiểm tra kỹ bao bì và hạn sử dụng trước khi dùng, chỉ sử dụng trong vòng 30 ngày từ khi mở nắp sản phẩm.

TP.HCM ngày 11 tháng 7 năm 2019
Người đại diện pháp luật của cơ sở



Bùi Quang Tuấn