

CÔNG TY CP ELLIE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 17 tháng 7 năm 2019

MẪU NHÃN GEL BÔI TRƠN RUNWAY

Gel bôi trơn RUNWAY được sử dụng trong quan hệ tình dục, có tác dụng bôi trơn, bổ sung lượng chất nhờn tự nhiên, tăng độ ẩm của âm đạo, khắc phục chứng khô âm đạo khi cơ thể không tiết đủ chất nhờn. Sản phẩm phù hợp cho những người cơ địa bị khô, ít chất nhờn do bị stress, mệt mỏi, thời kỳ mãn kinh. Gel bôi trơn Runway giúp dễ dàng hơn trong quan hệ tình dục.

Thành phần: Hydroxyethyl Cellulose, Sodium Benzoate, Acid citric, Nước.

Hướng dẫn sử dụng:

- Mở bao bì sản phẩm, ấn đầu chai xuống, lấy lượng gel vừa đủ thoa đều lên bộ phận sinh dục hoặc bao cao su. Có thể sử dụng cho cả nam và nữ.
- Sau khi dùng, gel dễ dàng rửa sạch và không lưu lại thành phần nào trong cơ thể.
- Kiểm tra hạn dùng trên sản phẩm, không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng hoặc quá 30 ngày sau khi mở nắp sản phẩm.
- Lắc đều trước khi sử dụng.

Chống chỉ định: Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Cảnh báo và thận trọng: Tránh tiếp xúc với mắt, nếu bị kích ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm, ngưng sử dụng.

Kiểm tra kỹ bao bì và hạn sử dụng trước khi dùng, chỉ sử dụng trong vòng 30 ngày từ khi mở nắp sản phẩm.

Bảo quản:

Đề nơi thoáng mát, khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.
Tránh xa tầm tay trẻ em.

Sản xuất tại: Công ty cổ phần Ellie. Lô C6-2, đường D2, KCN Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM.

ĐT: 028.62756648/ Email: congtyellie@gmail.com

Số lưu hành:

Số lô:

NSX:

HSD:

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
(Ký tên, ghi họ tên đầy đủ, chức danh)



Bùi Quang Trí