

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2019

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ TRỢ CỤ CHO NỆP VÍT KHÓA 5.0 MM

Hãng/ nước chủ sở hữu: AF Medical GmbH - Thụy Sĩ

Hãng/ nước sản xuất: AF Medical GmbH - Đức

Bộ trợ cụ cho nẹp vít khóa 5.0mm, vật liệu làm từ thép không gỉ, hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao trước khi đưa vào sử dụng.

Cần chuẩn bị như sau:

- Xà phòng, bàn chải và các dụng cụ để cọ rửa cho phù hợp.
- Dung dịch khử khuẩn và tiệt trùng ban đầu.
- Khăn lau, găng tay sạch.
- Pha dung dịch khử khuẩn ban đầu: bỏ dung dịch khử khuẩn ban đầu vào chậu rửa, nồng độ phù hợp theo hướng dẫn của từng loại dung dịch.
- Ngâm dụng cụ phẫu thuật vào dung dịch khử khuẩn trong vòng 5-10 phút. Sau đó tráng lại dụng cụ phẫu thuật bằng nước sạch.
- Vớt dụng cụ phẫu thuật ra khỏi dung dịch khử khuẩn và tráng dụng cụ dưới vòi nước chảy.
- Cọ rửa dụng cụ: Dùng bàn chải đánh kỹ từng góc ngách, khe kẽ của dụng cụ (đối với vật sắc nhọn cần đánh theo một chiều).
- Làm khô ráo dụng cụ: Lau khô dụng cụ bằng khăn sạch.
- Đóng gói dụng cụ: Cho dụng cụ vào hộp inox hay khăn gói dụng cụ, dán băng chỉ thị màu, dán nhãn ghi rõ ngày xử lý, hạn dùng và tên người xử lý.
- Tiệt trùng dụng cụ: Để dụng cụ vào máy hấp tiệt trùng phù hợp.
- Bảo quản dụng cụ: Dụng cụ có thể sử dụng ngay hoặc được đặt trong tủ lưu trữ.



ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU

GIÁM ĐỐC
Cù Huy Phụng