



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sản phẩm làm sạch, làm dịu, phòng ngừa biến chứng da do tia xạ Radialem

RADIALEM: Bảo chế dưới dạng xịt không chứa cồn, dễ dàng sử dụng, an toàn cho mọi lứa tuổi. Radialem làm sạch, làm dịu và loại bỏ các tác nhân gây ra nhiễm trùng. Bảo vệ, hỗ trợ làm lành các thương tổn gây nên bởi ánh nắng mặt trời, khi chiếu xạ, trị liệu bằng laser.

1. Cơ chế hoạt động

RADIALEM là dung dịch dùng ngoài làm sạch vùng da tổn thương bởi tác động của acid hypochlorous và loại bỏ các tác nhân gây kích ứng và nhiễm trùng. Không chứa cồn, phù hợp mọi lứa tuổi và không cần rửa lại.

2. Thành phần

RADIALEM contains:

- 0.024% Hypochlorous Acid
- Ionised Water
- Sodium Chloride

3. Cách sử dụng

Xịt đều làm ướt vùng da tổn thương và để khô tự nhiên. Không cần rửa lại.

4. Tác dụng phụ

Không có báo cáo về tác dụng phụ.

6. Bảo quản

- Bảo quản nhiệt độ phòng không quá 25°C.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
- Không bảo quản lạnh.
- Đậy nắp lại sau khi sử dụng.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Chỉ sử dụng ngoài da.

7. Cảnh báo và phòng ngừa

- Không sử dụng RADIALEM trong trường hợp quá mẫn hoặc không dung nạp với bất kỳ thành phần nào.
- Để có hiệu quả tốt nhất là xịt lên da khô.
- Chỉ sử dụng tại chỗ.
- Không sử dụng trên vết thương hở.

8. Hạn sử dụng

Không sử dụng sau ngày hết hạn in trên bao bì.

9. Lưu ý

Sản phẩm hết hạn phải được quản lý theo quy định quản lý chất thải.

Nhà nhập khẩu, phân phối: Công ty TNHH MTV Provix Việt Nam.

P1001, nhà N3A, đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.