



# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## BÀN KHÁM NỘI SOI TAI MŨI HỌNG

Model: MF-1000T

Nhãn hiệu/Hãng sản xuất : MEFACO

### Thông số kỹ thuật:

Bàn khám và điều trị tai mũi họng được thiết kế cho chuyên khoa khám và điều trị tai mũi họng. Mặt bàn làm bằng đá nhân tạo, chống trầy xước và dễ dàng vệ sinh. Thân bàn làm bằng sắt sơn tĩnh điện chịu lực và chịu nhiệt.

- Nguồn điện : AC 220v 50/60Hz
- Công suất tiêu thụ : 1200 W
- Kích thước : 1800mm(W) x 650mm(D) x 850(H)

### Phụ kiện tiêu chuẩn :

- Bộ khí nén với các tay : 01 cái,
- Bộ khí hút chân không chống rung : 01 bộ,
- Máy sấy chống mờ sương : 01 cái,
- Ca chứa bông gòn : 01 chiếc,
- Cốc đựng nước muối sinh lý : 03 cốc,
- Ngăn kéo dụng cụ : 01 cái,
- Ngăn chứa dụng cụ tiệt trùng bằng tia UV : 01 cái,
- Kênh chứa ống soi tiệt trùng bằng tia UV : 01 cái,
- Kênh để ống soi tiệt trùng : 01 cái,
- Vòi phun rửa ống hút dịch : 01 cái,
- Bình chứa dịch : 01 cái
- Thiết bị phun : 01 cái,
- Cốc ngâm optic : 03 cốc,
- Xô chứa rác thải : 01 cái,
- Bộ lọc nước : 01 bộ,
- Bàn có các tay treo : Để treo đèn khám, treo, màn hình, đèn đọc phim, kính hiển vi.

### Phụ kiện tùy chọn:

- Ghế bác sĩ ;



- Hệ thống nội soi

### **Lắp đặt thiết bị:**

1. Đặt cố định tại vị trí làm việc phù hợp.
2. Lắp hệ thống giá đỡ đèn và đèn khám, khay giá để dụng cụ
3. Lắp đặt các phụ kiện lên bàn.
4. Kết nối cáp điều khiển.
5. Cắm dây nguồn.
6. Ngắt nguồn điện khi không sử dụng.

### **Hướng dẫn sử dụng:**

- Kiểm tra nguồn điện trước khi sử dụng.
- Bật công tắc nguồn.
- Sử dụng các phụ kiện theo từng thao tác cho phù hợp.
- Tắt các thiết bị khi không sử dụng.

### **Cảnh báo và thận trọng:**

- Đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Không đặt thiết bị ở nơi ẩm thấp, gần nguồn điện, nguồn phát nhiệt hoặc tiếp xúc với hóa chất.
- Để tránh hiện tượng dòng điện cảm ứng, nên mang giày dép khi sử dụng thiết bị.

