



CÔNG TY TNHH TM TBYT HOÀNG THỊNH PHÁT

11 Phạm Quý Thích – Phường Tân Quý- Quận Tân Phú – TP. Hồ Chí Minh

Tel: 08.35592683-35592684 Fax: 08.35591955


Email : htpmedical@hoangthinhphat.vn - htpmedical@gmail.com

HOANGTHINHPHAT.VN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỤNG CỤ CHỐNG CẢN LƯỖI

Đặt dụng cụ ở cổ họng bệnh nhân, dụng cụ được đưa vào miệng với mặt cong được hướng lên trên. Khi mỏ của nó tiếp xúc với phần sau của vòm miệng, hãy thực hiện một vòng quay 180 độ để ấn dụng cụ vào hoàn toàn, cố định lại rồi luồn các ống dẫn cần thiết vào trong cơ thể qua đường miệng.

Giám Đốc

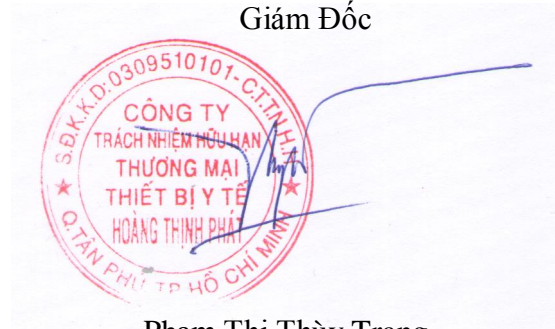

Phạm Thị Thùy Trang