

CÔNG TY TNHH MTV
BÔNG THÀNH TÍN
SỐ: 001/HSDS-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 10 tháng 06 năm 2019

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Sản phẩm bông y tế với thành phần 100% từ nguyên liệu bông cotton tự nhiên có công dụng dùng để lau chùi các vết thương, ngoài ra còn làm bông tiêm, bông tẩy trang, làm lớp đệm khi băng bột tay, chân bị gãy... và sau đây là cách hướng dẫn sử dụng như sau:

- Xé miệng bịch lấy lượng bông theo yêu cầu, lau chùi vệ sinh các vết thương (có thể dùng nước diệt khuẩn khi rửa vết thương)
- Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh bụi, tránh ánh sáng mặt trời.
- NSX- LSX- HSD: Xem trên bao bì (thời hạn sử dụng là 24 tháng kể từ ngày sản xuất)
- Tiêu chuẩn: TCCS
- Lưu ý: Không sử dụng quá 30 ngày sau khi đã mở miệng bịch.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
(Kí tên, ghi họ tên đầy đủ chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



Nguyễn Mạnh Quốc Phú