

# TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

## Dung dịch vệ sinh mũi GREENSIX

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế:

Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ DOLEXP HAR

Địa chỉ: Lô C2, KCN Đại An, Thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải-Dương.

Hải Dương, ngày 22 tháng 07 năm 2019



STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Dung dịch muối biển dạng phun sương phân tán đều trên niêm mạc mũi giúp vệ sinh, làm sạch, kháng khuẩn, kháng viêm, giúp phòng ngừa viêm mũi, viêm xoang, giúp mũi thông thoáng, dễ thở, phục hồi độ ẩm tự nhiên cho mũi.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Hộp gồm 01 bình xịt đựng trong hộp giấy. Bên trong bình xịt chứa dung dịch vệ sinh mũi. Dung tích bình: 50ml, 70ml, 100ml, 150ml
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	- Nước muối Natri clorid 0,9% dạng xịt phun sương dùng được cho trẻ em trên 3 tháng tuổi, phụ nữ mang thai và người lớn. - Dung dịch vệ sinh xịt mũi Greensix có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm, giúp phòng ngừa viêm mũi, viêm xoang. - Giúp làm sạch dịch nhầy, gỉ mũi, giúp mũi thông thoáng, dễ thở, phục hồi độ ẩm tự nhiên cho mũi.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	- Mở nắp bảo vệ theo chiều thẳng đứng. - Đầu hơi ngả về phía sau, đưa vòi xịt vào mỗi bên mũi, dùng tay ấn dứt khoát 2 đến 3 lần mỗi bên mũi. - Để dung dịch dư kéo theo chất nhầy chảy ra ngoài, rồi hỉ mũi và lau sạch mũi. - Sử dụng 3 đến 4 lần/ngày. - Lau sạch, khô vòi phun, đậy nắp bảo vệ sau khi sử dụng. - Bảo quản nơi khô mát, xa tầm tay trẻ em.
1.5	Chống chỉ định	Dị ứng với bất kỳ thành phần nào của dung dịch.

1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không sử dụng các dung dịch khác để thay thế khi dung dịch vệ sinh mũi trong chai hết.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	<i>Không có</i>
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có):	<i>Không có</i>
3	Chi định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có):	<i>Không có</i>
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế:	<i>Không có</i>

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Danh Long*