

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bộ đặt nội khí quản có camera

Model: ClearVue

Hãng SX: Infinium Medical, Inc/ Mỹ



Gắn lưỡi của bộ đặt nội khí quản :

Lắp lưỡi bộ đặt nội khí quản ở đầu tay cầm và kéo lên phần đầu của lưỡi cho đến khi đuôi lưỡi khớp với đầu tay cầm. Khi nghe thấy tiếng click là lưỡi đặt đã được khớp với tay cầm .

Các phím bấm:

- 1. Power key : phìm bật tắt nguồn.***
- 2. M key : Phím Menu***
- 3. Phím ↑: Hình ảnh trước đó tang.***
- 4. Phím ↓: Hình ảnh tiếp theo giảm.***
- 5. SNAP key: Phím chụp, quay video.***
- 6. Camera: Chỗ thu hình.***

Để bật thiết bị nhấn giữ nút nguồn trong vài giây màn hình hiển thị các chức năng. Nếu lưỡi đặt nội khí quản đã được lắp trên màn hình sẽ hiển thị , khi màn hình không hiển thị nên kiểm tra lại kết nối giữa lưỡi và cán tay cầm đã được lắp chắc chắn chưa, nếu chưa thì tắt và làm lại.

Trên màn hình cũng hiển thị mức pin , ngày giờ.

Hoạt động của dụng cụ:

Cảnh báo: các lưỡi đèn và cán tay cầm cần được vệ sinh sạch và khử trùng trước khi sử dụng.

Điện năng tạo nhiệt cho kính sẽ làm sáng đầu lưỡi giúp hình ảnh sẽ không bị mờ nhòe trong điều kiện ẩm ướt của đường thở.

Ghi lại hình ảnh:

Nhấp nút chụp nhanh trên cán tay cầm để chụp ảnh. Khi biểu tượng xuất hiện hình ảnh tự động lưu vào thẻ nhớ (Không thể chụp ảnh khi thiết bị đang quay video).

Quay video

Nhấp giữ nút chụp để bắt đầu ghi, màn hình hiển thị Recording là hình ảnh bắt đầu được ghi, nhấp nút lần nữa sẽ chấm dứt quá trình ghi. Hình ảnh video vừa ghi sẽ được tự động lưu vào thẻ nhớ.

Xem lại hình ảnh và video:

Nhấn nút “M” và chọn chế độ xem hình và video để xem .
Mỗi file được xác định bằng dấu thời gian / ngày tháng.

Thoát video:

Nhấp nút “M” để tạm dừng việc xem video và nhấp nút “Snap” để thoát chế độ xem lại.

Thiết lập thời gian và ngày

Nhấp nút “M” và chọn Time Setting để cài đặt thời gian

- Nhấp mũi tên lên xuống để cài đặt sửa đổi ngày giờ
- Nhấp nút “M” để xác nhận các thay đổi (kết thúc bên phải màn hình sẽ hiển thị thời gian đã cài đặt.

Vệ sinh thiết bị:

Xử lý và làm sạch màn hình: Không thấm nước và tiếp xúc với chất lỏng quá mức. Mặt bộ phận bao gồm các nút điều khiển phía trước được dán kín và có thể làm sạch bằng dung dịch . Phần còn lại của thiết bị phải được làm sạch cẩn thận tránh chất lỏng thấm vào bên trong màn hình.

Vệ sinh lưới đèn: Lưới đặt nội khí quản không nên để ngoài nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp trong quá trình làm sạch. Lưới có thể được làm sạch thông qua ngâm trong dung dịch hoặc khử trùng bằng nhiệt độ thấp bằng khí hydro peroxit (tháo đèn ra khỏi lưới trước khi làm sạch). Không được tiệt trùng nhanh hoặc tiệt trùng trong khí nóng.

Pin sạc :

Kết nối với bộ sạc thông qua cổng USB ở đầu màn hình, đèn LED sẽ sáng khi sạc pin và tắt khi pin đã được sạc đầy.

- Khi pin sắp hết thiết bị sẽ báo trước khoảng 5 phút .
- Thời gian Pin được sử dụng trong khoảng 2 giờ.
- Thời gian sạc pin là 8 giờ.

