

AQT90 FLEX

Cleaning Solution Tubes

REF 905-843

Mục đích sử dụng

Chỉ sử dụng cho xét nghiệm trong ống nghiệm.

Cleaning Solution Tubes được sử dụng để vệ sinh phần xử lý mẫu của hệ thống lưu dẫn chất lỏng trong thiết bị phân tích AQT90 FLEX.

Chuẩn bị

Sẵn sàng sử dụng và không nên mở nắp ống.

Quy trình

Xem thêm *Hướng dẫn vận hành AQT90 FLEX* để biết thêm chi tiết.

Thành phần hóa học

Dung dịch Sodium hypochlorite < 5% (w/v) pha trong nước.

pH

Khoảng 12.



CẢNH BÁO – Nguy cơ tạo thành khí ga độc hại

Không trộn các thành phần trong Cleaning Solution Tubes với bất kỳ sản phẩm nào khác. Nếu không, khí chlorine nguy hiểm có thể được tạo thành.



CẢNH BÁO – Nguy cơ ăn mòn

Tránh tiếp xúc với da và mắt. Dung dịch có thể ăn mòn da, mắt và bề mặt mềm.



Radiometer, the Radiometer logo, ABL, AQT, TCM, RADIANCE, AQUIRE, PICO, CLINITUBES and QUALICHECK are trademarks of or used under license by Radiometer Medical ApS.

© 2013 Radiometer Medical ApS. All rights reserved.



Manufactured by:
Radiometer Medical ApS
Åkandevvej 21
2700 Brønshøj
Denmark
www.radiometer.com

RADIOMETER