

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế:

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Quân

Số 19 Hẻm 387/63/6 Vũ Tông Phan – Khương Đình- Thanh Xuân- Hà Nội


Tên vật tư y tế tiêu hao: **Túi cho ăn**

Các bước sử dụng trang thiết bị y tế:

- Rửa tay sát khuẩn sau đó xé bỏ túi nilon đựng ngoài túi .
- Mở nắp túi và cho thức ăn lỏng vào , đóng lấp lại .
- Nối đầu dây vào ống nội khí quản , treo túi lên và mở van cho thức ăn chảy từ từ theo đường ống dẫn vào bệnh nhân .
- Điều chỉnh cho lượng thức ăn lỏng chảy hợp lý phù hợp với bệnh nhân.

Hà nội, ngày 05 tháng 07 năm 2019

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY


GIÁM ĐỐC
Hoàng Thị Ngọc