

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Enzyme Cleaner Tube

REF

01-12-0001

5/pk

Mục đích sử dụng

Bộ sản phẩm Enzyme Cleaner Tube được sử dụng để loại bỏ các cặn protein trong cột sắc ký và hệ thống lấy mẫu trên máy phân tích hemoglobin A1c, nhằm giúp cột đạt được tuổi thọ cao nhất.

Enzyme Cleaner Tube (Mã # 01-12-0001) được cung cấp ở dạng 5 viên enzyme đựng riêng trong các ống chân không. Sản phẩm chỉ được sử dụng trong chẩn đoán *in vitro*.

IVD

Tóm tắt và giải thích xét nghiệm

Khuyến cáo thực hiện quy trình xử lý bằng enzyme khi tiến hành đảo chiều cột sắc ký sau mỗi 400 lần tiêm mẫu. Quy trình này được chứng minh giúp làm tăng tổng số lần tiêm mẫu có thể thực hiện trên mỗi cột. Quy trình đảo cột và xử lý bằng enzyme giúp:

- Ổn định chất lượng sắc ký đồ.
- Giảm tích tụ các cặn bít tắc đầu vào của mẫu trên cột – qua đó, giúp giảm áp suất hệ thống và tăng tuổi thọ cột.
- Tuổi thọ cột được kéo dài giúp công việc thuận lợi, ít bị gián đoạn do thay cột/hiệu chuẩn/sắc ký đồ xấu.

Khi đảo chiều cột sắc ký:

- Đảm bảo đã kéo các ốc kết nối ra xa đầu ống dẫn vào cột.
- Khi lắp các ốc vào cột, đảm bảo ống dẫn đã được luồn vào và giữ trong ốc chốt khi thực hiện vận ốc.

Thực hiện các quy trình này thường xuyên giúp giảm số lần thay cột, giảm số lần hiệu chuẩn lại và giúp giá trị kiểm chứng ổn định hơn.

Độ ổn định và bảo quản



Bảo quản ở nhiệt độ phòng (15-30°C), tránh ánh sáng trực tiếp. Không được bảo quản đông lạnh sản phẩm. Không mở ống cho tới khi cần tiến hành thao tác rửa enzyme.

Sản phẩm ổn định đến hết hạn sử dụng khi được bảo quản đầy chặt nắp.



EXP Xem nhãn sản phẩm để biết thông tin về hạn sử dụng. **KHÔNG SỬ DỤNG** sản phẩm đã quá hạn sử dụng.










Thận trọng

Chỉ dùng trong chẩn đoán *in vitro*. Tránh để sản phẩm tiếp xúc với da. Tham khảo Bảng dữ liệu an toàn (MSDS) để biết thêm thông tin chi tiết. Sản phẩm này được sử dụng kết hợp với thiết bị

xét nghiệm máu, do đó, người dùng cần tuân thủ các quy định chung về an toàn khi thao tác.

Quy cách đóng gói

| Mã sản phẩm | Sản phẩm | Quy cách đóng gói |
|-------------|---------------------|-------------------|
| 01-12-0001 | Enzyme Cleaner Tube | 5/pk |

| | |
|---|---|
|  Chủ sở hữu |  Phù hợp với tiêu chuẩn Châu Âu |
|  Văn phòng đại diện tại Châu Âu |  Mã sản phẩm |
|  Số lô |  Sử dụng trong chẩn đoán in vitro |
|  Hạn sử dụng |  Dải nhiệt độ bảo quản |
|  Tham khảo hướng dẫn sử dụng | |

Cơ sở sản xuất / Chủ sở hữu sản phẩm: Trinity Biotech
Địa chỉ: 4231 East 75th Terrace, Kansas City, Missouri, 64132, USA.