



**XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ**  
**HAI HA METAL WARE ENTERPRISE**



## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

### **Giường bệnh 1 tay quay**

**Model: G6.S**

#### **1. Lắp ráp :**

- Cài tấm đầu và đuôi giường sao cho 2 móc và chốt của đầu giường ăn khớp với khung giường.

#### **2. Cọc truyền:**

- Sau khi đã lắp ráp xong giường, cắm cọc cọc truyền vào 1 lỗ trong 4 lỗ ở vị trí các góc của khung giường sao cho ngay ngắn.

- Tăng chỉnh độ cao của thân cọc truyền bằng núm vặn sao cho đạt độ cao mong muốn

#### **3. Tay quay nâng/hạ các chức năng:**

- Kéo tay quay ra hết cỡ, duỗi phần tay cầm cho vuông góc.

- Quay sang phải nếu muốn nâng đầu giường và ngược lại

- Sau khi sử dụng xong, gấp gọn tay cầm, thu gọn thân tay quay lại quay về như vị trí ban đầu.

\* Lưu ý : khi quay có tiếng “tạch tạch” là phải dừng quay vì đó là giới hạn tối đa cho phép.

#### **4. Bánh xe:**

- Có 2 bánh xe có phanh :

+) Nhấn gạt nút “ON” khi cần phanh.

+) Nhả phanh thì nhấn “OFF”.

#### **5. Vệ sinh sản phẩm:**

- Lau nhẹ nhàng bằng khăn mềm, có thể dùng nước rửa kính hoặc cồn y tế sát khuẩn

- Không dùng những hóa chất tẩy rửa mạnh, có tính axit,...

-----