

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### CÁC LOẠI MẶT NẠ CỐ ĐỊNH ĐẦU-CỔ | MẶT NẠ CỐ ĐỊNH ĐẦU VAI-NGỰC

#### Mặt nạ cố định đầu-cổ

1. Điều chỉnh nhiệt độ nôi hấp mặt nạ khoảng 70-75 °C (160-170 °F).
2. Định vị đế cố định mặt nạ trên bàn điều trị với gối đỡ đầu phù hợp.
3. Đặt bệnh nhân nằm trên bàn điều trị.
4. Nhúng mặt nạ vào nôi hấp đến khi mặt nạ trở nên trong suốt (khoảng 1-2 phút).
5. Lấy mặt nạ khỏi nôi hấp, nhanh chóng thấm/lắc cho hết nước còn dính vào mặt nạ, thử độ nóng của mặt nạ đảm bảo mặt nạ không quá nóng có thể gây bỏng.
6. Cắn mặt nạ chính giữa mặt của bệnh nhân. Miết mặt nạ xuống nhẹ nhàng từ cằm đến toàn bộ mặt bệnh nhân, đến khi mặt nạ chạm xuống đế cố định trên mặt bàn điều trị. Điều chỉnh lỗ trên khung mặt nạ khớp chốt cài của đế cố định và khóa mặt nạ với đế.
7. Sử dụng các ngón tay, nhẹ nhàng và nhanh chóng tạo mặt nạ đúng khuôn mặt của bệnh nhân (mũi, miệng, má...), yêu cầu bệnh nhân nên nhắm mắt trong quá trình làm mặt nạ cũng như khi điều trị.
8. Khi mặt nạ nguội, nó sẽ định hình cứng lại như trước khi đưa vào nôi hấp. Không tháo rời mặt nạ khi chưa hoàn toàn nguội và nên giữ nguyên vị trí này khoảng 5 phút. Mặt nạ sẽ co lại một chút trong quá trình lạnh. Nếu tháo rời mặt nạ ra sớm quá sẽ làm cho mặt nạ cọ sát vào da bệnh nhân khi điều trị.
9. Nếu yêu cầu, có thể phải cắt mặt nạ ở một vị trí nào đó, thì cần sử dụng kéo/dụng cụ cắt chịu lực.

#### Mặt nạ cố định đầu vai-ngực(/ngực/khung chậu)

1. Điều chỉnh nhiệt độ nôi hấp mặt nạ khoảng 70-75 °C (160-170 °F).
2. Định vị đế cố định mặt nạ trên bàn điều trị.
3. Đặt bệnh nhân nằm trên bàn điều trị với các thiết bị cố định khác theo yêu cầu.
4. Nhúng mặt nạ vào nôi hấp đến khi mặt nạ trở nên trong suốt (khoảng 1-2 phút).
5. Lấy mặt nạ khỏi nôi hấp, nhanh chóng thấm/lắc cho hết nước còn dính vào mặt nạ, thử độ nóng của mặt nạ đảm bảo mặt nạ không quá nóng có thể gây bỏng.
6. Cắn mặt nạ chính giữa trên phần cơ thể cần cố định của bệnh nhân. Có thể kéo giãn mặt nạ để được hình dạng cố định tốt nhất.
7. Sử dụng các ngón tay, nhẹ nhàng và nhanh chóng tạo mặt nạ đúng hình dạng phần cơ thể của bệnh nhân.
8. Khi mặt nạ nguội, nó sẽ định hình cứng lại như trước khi đưa vào nôi hấp. Không tháo rời mặt nạ khi chưa hoàn toàn nguội và nên giữ nguyên vị trí này khoảng 5 phút. Mặt nạ sẽ co lại một chút trong quá trình lạnh. Nếu tháo rời mặt nạ ra sớm quá sẽ làm cho mặt nạ cọ sát vào da bệnh nhân khi điều trị.
9. Nếu yêu cầu, có thể phải cắt mặt nạ ở một vị trí nào đó, thì cần sử dụng kéo/dụng cụ cắt chịu lực.

#### Hỗ trợ kỹ thuật

Nếu có bất kỳ thắc mắc đến sản phẩm xin vui lòng liên hệ Kỹ sư Quận Thành Long (0945.347.880).

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Danh Hưng