

## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE

Địa chỉ trụ sở: Tầng 9, Tòa nhà Cotana, Lô CC5A, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Sản xuất tại: 162 đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam.

Tên trang thiết bị y tế: **Cốc nguyệt san Name Cup**

Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2019

### Hướng dẫn sử dụng.

**Đưa vào:** Ngồi ở tư thế thư giãn. Thả lỏng cơ âm đạo. Gập cốc gọn lại (hình chữ V hoặc chữ C, hoặc chữ S). Đưa cốc vào âm đạo. Nhấn vào nếp gấp để cốc mở hẳn ra. Đưa ngón trỏ quanh đáy cốc để chắc chắn cốc đã mở hết. Dùng cơ âm đạo để ôm gọn cốc vào trong.

**Tháo ra:** Ngồi xổm dùng cơ âm đạo đẩy cốc ra ngoài. Lúc này núm cốc sẽ tụt ra bên ngoài, cầm lấy núm lay nhẹ theo đường zic zắc kéo cốc ra và đổ dịch kinh đi.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Cao Thành*