

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME

Số nhà 22, ngách 52, ngõ 12 Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận

Hoàng Mai, Hà Nội

Tel: 0243 822 55 66/

Email: contact@imemedical.com.vn

Website: <http://imemedical.com.vn>




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN MỎ

I. Hướng dẫn sử dụng

1. Kết nối nguồn điện

2. Điều chỉnh các thông số đèn theo hướng dẫn sau:

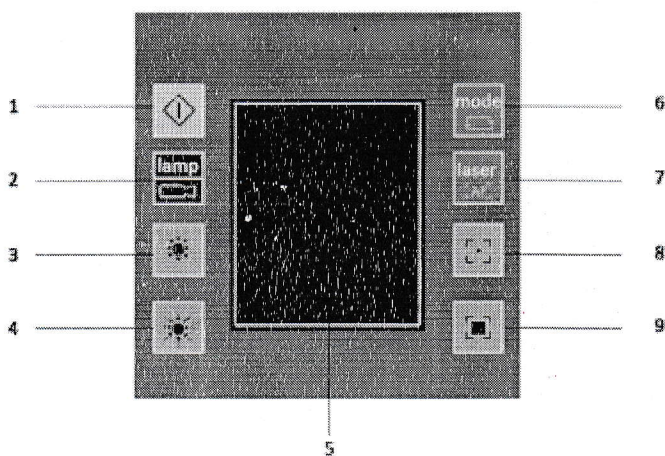

1. Công tắc bật/tắt
2. Đèn công tắc/camera (chỉ hoạt động với camera tự chọn)
3. Giảm cường độ sáng. Ở chế độ camera, giảm cường độ sáng bằng Zoom-
4. Tăng cường độ sáng. Ở chế độ camera, tăng cường độ sáng bằng Zoom +
5. Màn hình hiển thị
6. Công tắc chế độ: Chế độ nội soi, chế độ trung tâm, chế độ bình thường
7. Kim chỉ laser- Ở chế độ camera, tắt /mở tiêu điểm tự động
8. Giảm tiêu cự
9. Tăng tiêu cự

II. Bảo dưỡng

- Phải để đèn nguội trước khi bảo dưỡng
- Tay nắm có thể tháo ra để tiệt trùng bằng cách tiệt trùng hơi nước. Nhiệt độ tiệt trùng không quá 1340C
- Lau sạch đèn mổ bằng 3% dung dịch nước oxy già với nước xà phòng nhẹ

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

