



Nutrition Division

Think green - Be green - Healthy life

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: Dung dịch phụ khoa **GYNEPINK® RELIEF**

Chủng loại/Model: **GYNEPINK® RELIEF - 8054956421015**

THÀNH PHẦN:

GYNEPINK® RELIEF có thành phần chính được chiết xuất từ thảo dược tự nhiên như: Tinh dầu oải hương (lavender), tinh chất Alovera, tinh chất cam thảo, tinh dầu đinh hương (cloves), tinh chất α -Bisabolol từ hoa cúc, acid Lactic, acid Boric và các phụ liệu vừa đủ cho chai 100ml.

GYNEPINK® RELIEF có tác dụng:

- + Kháng khuẩn và kháng nấm.
- + Làm sạch các chất viêm tại âm đạo
- + Chống viêm và cân bằng PH âm đạo (*giúp hệ vi sinh vật có ích tại âm đạo phát triển bình thường*)
- + Giúp giảm các triệu chứng: ngứa, khô rát, kích thích khó chịu, mau lành các tổn thương tại âm đạo, giảm mùi hôi khó chịu.

CHỈ ĐỊNH:

GYNEPINK® RELIEF được chỉ định cho các trường hợp sau:

- + Người bị viêm âm hộ, âm đạo, viêm cổ tử cung, viêm phần phụ do vi khuẩn, do nấm (hoặc do cả hai)
- + Người bị can thiệp sản khoa vùng âm đạo (*sau nạo hút, sau đẻ, sau đốt cổ tử cung ...*)
- + Các trường hợp bị ngứa âm đạo, khô rát âm đạo do dùng viên đặt kháng sinh dài ngày.

CÁCH DÙNG:

GYNEPINK® RELIEF là dung dịch phụ khoa gồm có 2 phần: Chai dung dịch 100ml và Đầu vòi xịt âm đạo.

- + Trước khi sử dụng phải cầm đầu xịt vào chai dung dịch và lắc đều.
- + Do đầu xịt phải cho vào trong âm đạo, tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc âm đạo nên phải tuân thủ chặt chẽ các bước sau:

- (1) Trước khi dùng phải vệ sinh tay sạch sẽ
- (2) Lắc kỹ dung dịch sản phẩm trước khi dùng
- (3) Giữ chặt cổ chai và xoay tháo nắp
- (4) Cho vòi xịt vào cổ chai và ấn nhẹ cho tới khi chặt
- (5) Chọn 1 tư thế thích hợp mà bạn muốn (*Ngồi trên toilet, Trong buồng tắm ...*) Điều quan trọng là khi xịt vào âm đạo thì dung dịch phải được chảy tuôn ra kéo theo các chất bẩn.





Nutrition Division

Think green - Be green - Healthy life

- (6) Bóp chai dứt khoát để dung dịch chảy vào âm đạo, có thể lặp lại 2-3 lần cho tới khi dung dịch trong chai hết
- (7) Dùng giấy vệ sinh lau khô nhẹ nhàng, không được dùng vòi xịt nước rửa
- (8) Dung dịch dùng một lần trong ngày (có thể chia làm hai lần sáng tối), không để qua ngày hôm sau. Hủy chai sau khi dùng hết.
- (9) Thời gian tốt nhất nên dùng là buổi tối, trước khi đi ngủ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng **GYNEPINK® RELIEF** cho người bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm

CẢNH BÁO AN TOÀN:

Việc dùng sản phẩm kéo dài có thể dẫn đến các dấu hiệu kích ứng gây khó chịu, trong trường hợp này phải dừng dùng sản phẩm và đi khám tư vấn bác sĩ

Để xa tầm với của trẻ em

Không dùng sản phẩm khi hết hạn sử dụng, hạn dùng in trên bao bì

Không dùng khi sản phẩm bị hư hỏng bao bì (nắp chai bị mở)

Thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú (nên tư vấn bác sĩ trước khi dùng)

THỜI HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất xem trên bao bì sản phẩm

BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp và xa nguồn nhiệt nóng

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 chai 100ml và hộp 5 chai 100ml

SỐ ĐK:

Hãng sản xuất, nước sản xuất: **ERBEX S.R.L**

Via Del Laghetto 110 - 45021 Badia Polesine (RO) Italy

Hãng chủ sở hữu, nước chủ sở hữu: **ValueMED Pharma S.r.l.**

Via Ventotto Luglio, 211 47893 Borgo Maggiore Republic of San Marino

Doanh nghiệp đăng ký lưu hành:

Công ty TNHH nhà máy SP sinh học NUTRI-PAX

Địa chỉ: Số 16, Ngõ 20 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, tp Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 096 432 0808 / Email: nutripax@gmail.com

Công ty TNHH nhà máy SP sinh học



**GIÁM ĐỐC
ĐỖ VĂN MINH**