

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIƯỜNG BỆNH NHÂN CHẠY ĐIỆN

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ngọc Thủy Nhi

Địa chỉ: Số 149 phố Yên Phụ, phường Yên phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, Việt Nam.

Model: A87, A87-03, A87-05, A89, A89-02, A89-03, A89-05, A89-09

### Hướng dẫn sử dụng

1. Khung giường: Đặt ngửa thân giường xuống bề mặt phẳng, lắp bốn bánh xe
2. Thành chắn: Lắp thành chắn vào hai bên thân giường. Thành chắn có thể nâng lên, gập xuống chỉ với một nút bấm
3. Tấm nhựa ABS đầu giường và cuối giường: Mở 2 chốt khóa 2 bên rồi đưa đồng thời hai bên đầu giường/ cuối giường vào sao cho chốt định vị khớp với rãnh cố định, nhấn mạnh xuống và móc cố định lại
4. Đặt cây truyền dịch vào ống có sẵn trên thân giường
5. Hệ thống điều khiển: Cắm dây điện vào nguồn 220V, điều khiển bật sáng, nhấn nút ON/OFF bắt đầu thao tác các chức năng:
  - Phạm vi nâng lưng:  $0 - 80^{\circ}$
  - Phạm vi nâng chân:  $0 - 45^{\circ}$
  - Phạm vi hạ chân:  $0 - 90^{\circ}$
  - Phạm vi nghiêng trái, phải:  $0 - 80^{\circ}$
  - Kết thúc đưa giường về vị trí cân bằng và nhấn nút ON/ OFF để tắt điều khiển
6. Đệm: Đặt đệm xơ dừa lên khớp với các bộ phận của thân giường
7. Đặt bàn ăn: Dựng thanh lan can hai bên lên, đặt hai rãnh bên bàn ăn vào với hai bên lan can


### Cảnh báo và thận trọng

Không đặt tay vào các bộ phận chuyển động của giường

Không sử dụng quá tải trọng của giường

Không ngồi lên lan can hoặc bấm liên tục vào nút bấm màu đỏ

Tránh không để bị nước dính vào bảng điều khiển và motor, dây điện

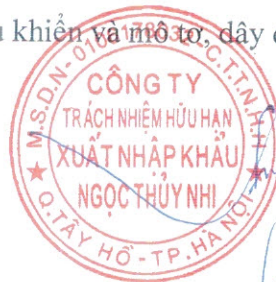

GIÁM ĐỐC

Bùi Kim Thủy