




**Dräger**


## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN TIÊU PHẪU VÀ THĂM KHÁM POLARIS 50**



1. Cắm điện nguồn 220V (50Hz).
2. Mở công tắc nguồn đằng sau, phía dưới xe đẩy.

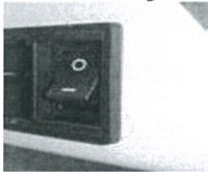

3. Sử dụng núm xoay trên đầu đèn để tắt mở đèn và điều chỉnh cường độ sáng

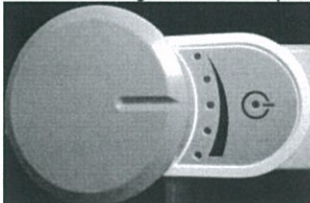

4. Điều chỉnh cánh tay và đầu đèn để có vị trí làm việc thuận lợi nhất.
5. Kéo đầu đèn xuống vị trí thấp nhất khi di chuyển đèn trong các khoa phòng cũng như khi lưu trữ đèn trong kho.

### **HỖ TRỢ KỸ THUẬT**

#### **CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM**

##### **Trụ sở chính:**

Lầu 8, Tòa nhà Dreamplex 195, 195 Điện Biên Phủ, P. 15, Quận Bình Thạnh - TP.

Hồ Chí Minh

Tel: (028) 6258 3687

Fax: (028) 6258 3686

**Đường dây nóng miễn phí: 1800 588 858**

##### **Văn phòng Hà Nội:**

Phòng 868 - Tòa nhà HITC, 239 Xuân

Thủy, Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Tel: (024) 3795 5615

Fax: (024) 3795 5614

**Đường dây nóng miễn phí: 1800 588 858**