

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & TBYT NAM PHÁT

Địa chỉ: Số 43 – ngách 60/2 – Đường Nguyễn Khuyến - Phường Trường Thi – TP Nam Định

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Sở y tế Nam Định

Ngày 20 tháng 08 năm 2019

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế:	Dung dịch vệ sinh phụ nữ ANGERLY care - NP
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<ul style="list-style-type: none">- Tên sản phẩm: Dung dịch vệ sinh phụ nữ ANGERLY care - NP (mã sp NP.07)- Mô tả sản phẩm: Dung dịch vệ sinh phụ nữ ANGERLY care - NP giúp trẻ hóa làn da vùng kín, làm hồng se khít, chống khô hạn, làm sạch, kháng khuẩn, khử mùi và ngăn ngừa viêm nhiễm phụ khoa nhờ sự kết hợp của tinh chất Tràu không, chiết xuất cúc La mã và bạc nano.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	01 chai 100 ml, 250 ml
1.3	Mục đích/ Chỉ định sử dụng	<ul style="list-style-type: none">- Vệ sinh hàng ngày ngăn ngừa các nguy cơ nhiễm và mắc các bệnh phụ khoa.- Vệ sinh vùng kín bị viêm nhiễm âm đạo, âm hộ: do vi khuẩn nấm, viêm nhiễm phụ khoa có mùi khó chịu, có khí hư- Giúp trẻ hóa làn da vùng kín, làm hồng se khít, chống khô hạn, làm sạch, kháng khuẩn, khử mùi.- Vệ sinh trong chu kỳ kinh nguyệt, hậu sản
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Làm ướt vùng kín, lấy 2 – 3ml dung dịch vào trong lòng bàn tay, thoa rửa nhẹ vùng kín trong 1 phút, sau đó rửa lại thật kỹ bằng nước sạch. Khi bị viêm nhiễm và các bệnh phụ khoa nên sử dụng liên tục từ 3 -4 tuần, dùng 2-3 lần/ ngày Sản phẩm được bào chế từ các thành phần tự nhiên và hữu cơ, tuyệt đối an toàn, thích hợp sử dụng cho mọi lứa tuổi.
1.5	Chống chỉ định	Dị ứng với bất cứ thành phần nào của dung dịch
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không có

1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
2.	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có) : không có	
3.	Chi định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có) : không có	
4.	Thông tin về tính an toàn / vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế. Sản phẩm an toàn không gây hại cho người sử dụng	

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)



Trần Thị Thùy Trang
GIÁM ĐỐC
Trần Thị Thùy Trang