



CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & TBYT NAM PHÁT

Địa chỉ: Số 43 ngách 60/2 Đường Nguyễn Khuyển - Phường
Trường Thi – TP Nam Định

---o0o---

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Sở y tế tỉnh Nam Định

Tên trang thiết bị y tế: Dung dịch vệ sinh phụ nữ ANGERLY care - NP

Hướng dẫn sử dụng :

- Làm ướt vùng kín, lấy 2 – 3ml dung dịch vào trong lòng bàn tay, thoa rửa nhẹ vùng kín trong 1 phút, sau đó rửa lại thật kỹ bằng nước sạch.
- Khi bị viêm nhiễm và các bệnh phụ khoa nên sử dụng liên tục từ 3 - 4 tuần, dùng 2-3 lần/ ngày
- Sản phẩm được bào chế từ các thành phần tự nhiên và hữu cơ, tuyệt đối an toàn, thích hợp sử dụng cho mọi lứa tuổi.

Cảnh báo và thận trọng:

- Dị ứng với bất cứ thành phần nào của dung dịch.
- Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Nam Định, ngày 12 tháng 8 năm 2019.

Người đại diện hợp pháp của Chủ sở hữu

(Ký tên – ghi đầy đủ họ tên, chức danh)



GIÁM ĐỐC
Trần Thị Thùy Trang