

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
ÔNG NGHE TIM PHỔI ERKA
MODEL: SENSITIVE

1. Mô tả sản phẩm:

- Ông nghe tim phổi Erka, model: Sensitive được sử dụng bởi Bác sĩ và người có chuyên môn để nghe âm thanh từ tim, phổi, ruột, động mạch bằng cách nghe âm thanh.
- Cấu tạo của Ông nghe gồm Mắt nghe, màng nghe, dây nghe, bộ ống và quai nghe, tai nghe.

2. Một số lưu ý quan trọng khi sử dụng:

- Không sử dụng ông nghe khi không có nút tai nghe.
- Không sử dụng ông nghe khi không có màng tai nghe.
- Tránh va đập, rung động khi sử dụng.

- Tránh các vật nhọn có thể làm thủng, rách phần ống cao su.

- Không đặt nút tai nghe quá sâu trong lỗ tai.

- Không dùng tác dụng nhiệt để sát trùng.

- Chỉ sử dụng các phụ tùng thay thế của hãng Erka.

- Không để và sử dụng ở nơi có từ tính mạnh.

3. Bảo quản và vận chuyển:

- Bảo quản ở nhiệt độ -10°C đến 40°C.

- Độ ẩm thấp hơn 85%.

- Không để ánh sáng UV chiếu vào phần vật liệu cao su.

4. Hướng dẫn vệ sinh, bảo dưỡng:

- Dùng bột tẩy rửa và vải cotton mềm để lau, vệ sinh ông nghe.

Đông Minh Hải
GIÁM ĐỐC

