

CÔNG TY TNHH Thiết bị y tế Quân Khoa

Địa chỉ: 39 đường Số 9, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

# TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dung dịch pha loãng/dung dịch ly  
giải/dung dịch rửa máy

Mã sản phẩm : 1100-1601/ Convergys Dil Diff/ 1100-1602/ Convergys Lyse Diff/ 1100-1603/ Convergys Cleaner

Hãng sản xuất: Convergent Technologies GmbH & Co. KG

## 1. Hướng dẫn sử dụng:

- Kiểm tra hạn dùng
- Đặt hóa chất vào vị trí phù hợp, mở nắp
- Thả dây hút của máy xét nghiệm huyết học vào chai
- Tiến hành làm xét nghiệm theo quy trình của máy xét nghiệm
- Khi sử dụng hết, vỏ sẽ được thải theo đúng quy trình và quy định.

## 2. Dự trữ và bảo quản các hóa chất:

- Dung dịch Convergys Dil Diff/ Convergys Lyse Diff/ Convergys Cleaner được thiết kế để sử dụng cho các phòng xét nghiệm. Phải chấp hành các biện pháp phòng ngừa thông thường. Dung dịch khi vận chuyển và bảo quản phải trong điều kiện khô ráo và ở nhiệt độ 15-30 C.

## 3. Cảnh báo và thận trọng:

- Dung dịch phải được cài đặt bởi người sử dụng chuyên nghiệp trên máy xét nghiệm huyết học Convergys®X3 theo tài liệu hướng dẫn sử dụng.
- Sử dụng sản phẩm đã hết hạn sử dụng, bị nhiễm khuẩn hoặc không đúng theo khuyến cáo có thể dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm hoặc hư hỏng các đường ống.

Người đại diện hợp pháp của công ty



Trần Quốc Thống