

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên Công Ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ

Địa chỉ: 725/2 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú

Số TT	SẢN PHẨM MÔ TẢ		HÃNG/ NƯỚC SẢN XUẤT		MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ						
	TÊN SẢN PHẨM	Chủng loại/ Mã SP	Tên hãng/ Công Ty	Tên nước	Mô tả trang thiết bị y tế	Mục đích/ Chỉ định sử dụng	Hướng dẫn sử dụng	Danh mục linh kiện	Chống chỉ định	Cảnh báo & thận trọng	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra
1	Bộ ống nghiệm nhựa PET (Bao gồm: thân ống nghiệm nhựa PET, nắp cao su bên trong và nắp nhựa bên ngoài)	14-F;627#,12.5*75	HEBEI FIRST RUBBER MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	Trung Quốc	- Ống nghiệm nhựa được đậy bằng 1 nắp nhựa bao bên ngoài miệng ống và 1 nắp cao su đậy bên trong miệng ống. Kích thước 12x75 mm. - Ống nghiệm được đóng trong bịch. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	Dùng để chứa mẫu máu, tách huyết thanh trong cơ thể.	Mẫu cần được trộn đều ngay lập tức bằng cách đảo chiều nhẹ nhàng 5 lần. - Quay ly tâm 10 phút với vận tốc 2.000 vòng/ phút. - Tách huyết thanh sang ống nghiệm khác ngay sau khi ly tâm.	Không có	Không có	Cần chờ thời gian đông máu tối thiểu là 15 phút. Bảo quản ống ở vị trí thẳng đứng, quay ly tâm từ phút thứ 15 sau khi chờ thời gian đông máu, nên quay ly tâm và đưa vào sử dụng tối đa 2 giờ sau khi lấy mẫu.	Không có

Tp. HCM, ngày 26 tháng 08 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ



TỔNG GIÁM ĐỐC
BS. TÔ ÁNH LOAN