




TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Thiết bị: Thiết bị đúc mô bệnh phẩm

Model: MPS/P1

Nhà sản xuất: Slee Medical

Xuất xứ: Đức

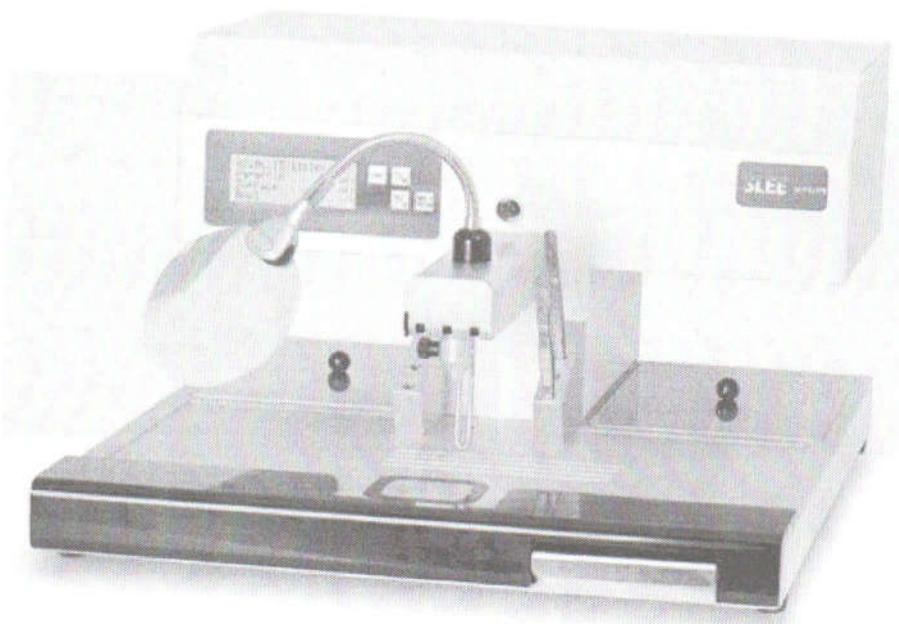

- Cho paraffin vào bể đun chảy.
- Cài đặt nhiệt độ modul đúc, modul làm ấm cassettes và khuôn đúc, modul làm đông khối nền sau khi đúc thích hợp.
- Làm nóng khuôn đúc Inox và cassettes
- Đặt mẫu mô vào khuôn đúc, rót paraffin vào đầy khuôn đúc sau đó đặt cassette vào khuôn, rót thêm paraffin vào cassette làm dần đều paraffin.