

stryker[®]

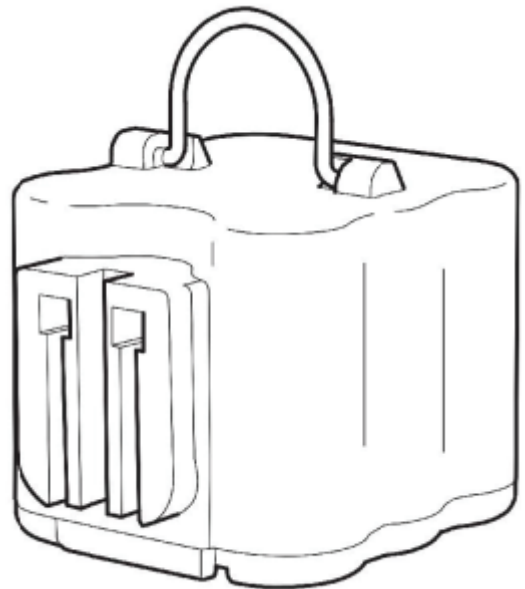
Pin không vô trùng

Hệ thống 6

REF 6126-110-000

Hướng dẫn sử dụng

CE



Giới thiệu

Sổ tay *hướng dẫn sử dụng* này chứa thông tin toàn diện nhất nhằm đảm bảo việc sử dụng sản phẩm an toàn và hiệu quả. Sổ tay hướng dẫn này được thiết kế dành cho các cán bộ đào tạo tại chỗ, các bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên phòng phẫu thuật và các kỹ thuật viên trang thiết bị y sinh. Hãy giữ và tham khảo sổ tay hướng dẫn tham khảo này trong suốt thời gian sử dụng sản phẩm.

Các quy ước sau được sử dụng trong sổ tay hướng dẫn này:

- **CẢNH BÁO** nêu bật vấn đề liên quan đến an toàn. **LUÔN LUÔN** tuân theo thông tin này để ngăn ngừa thương tích của bệnh nhân và/hoặc nhân viên y tế.
- **THẬN TRỌNG** nêu bật vấn đề độ tin cậy của sản phẩm. **LUÔN LUÔN** tuân theo thông tin này để tránh khiến sản phẩm hư hỏng.
- **LƯU Ý** bổ sung và/hoặc làm rõ các thông tin về quy trình.

Để biết thêm thông tin, bao gồm thông tin về an toàn, đào tạo tại chỗ hoặc tài liệu hiện tại, hãy liên hệ với đại diện bán hàng của Stryker hoặc gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng của Stryker. Nếu ở ngoài Hoa Kỳ, hãy liên hệ với công ty con Stryker gần nhất.

Chỉ định sử dụng

Pin không vô trùng của Stryker (REF 6126-110-000) được sử dụng với bộ tay khoan hệ thống 6 của Stryker. **KHÔNG** khử trùng các pin này. Sau khi pin không vô trùng được sạc, hãy đặt nó vào vỏ vô trùng đã được khử trùng bằng cách sử dụng tấm chắn nước di động. Vỏ chứa pin sau đó được lắp vào tay khoan của Stryker. Xem phần *Sử dụng với*.

Chống chỉ định

Không áp dụng.

An toàn cho bệnh nhân/người sử dụng



CẢNH BÁO:

- Chỉ những chuyên gia y tế được đào tạo và có kinh nghiệm trong việc sử dụng thiết bị y tế này mới được vận hành thiết bị này.
- Trước khi sử dụng thiết bị này, hoặc bất kỳ bộ phận nào tương thích với thiết bị này, hãy đọc và hiểu rõ các hướng dẫn sử dụng. Chú ý đặc biệt đến thông tin **CẢNH BÁO**. Hãy làm quen với thiết bị trước khi sử dụng.
- Ngay khi nhận được lần đầu tiên và trước mỗi lần sử dụng, kiểm tra từng bộ phận xem có hư hỏng hay không. Hư hỏng có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các tiếp điểm bị cong và các vết nứt trong vỏ. **KHÔNG** sạc hoặc sử dụng nếu có hư hỏng.

- KHÔNG sử dụng thiết bị này ở những khu vực có chất gây tê dễ cháy hoặc các chất dễ cháy được trộn lẫn với không khí, oxy hoặc oxit nitơ.
- KHÔNG chỉnh sửa bất cứ bộ phận hoặc phụ kiện của hệ thống.
- KHÔNG khử trùng

Sử dụng với



Pin không vô trùng của Stryker được thiết kế để sử dụng với các bộ dụng cụ pin vô trùng sau của Stryker:

Pin không vô trùng	Bộ dụng cụ pin vô trùng *
REF 6126-110-00	REF 6126-000-000

* Bao gồm pin không vô trùng (REF 6126-110-000), tấm chắn nước di động (REF 6126-30-000), và vỏ vô trùng (REF 6126-120-000).

Định nghĩa

Các biểu tượng ở trên thiết bị và/ hoặc trên nhãn hiệu đều được định nghĩa trong phần này hoặc trong *Biểu đồ định nghĩa biểu tượng*. Xem *Biểu đồ định nghĩa biểu tượng* được cung cấp kèm theo thiết bị.

BIỂU TƯỢNG	ĐỊNH NGHĨA
	Tham khảo sổ tay hướng dẫn/cắm nang hướng dẫn
	Ký hiệu cảnh báo chung
DO NOT STERILIZE	Không khử trùng

Hướng dẫn

THẬN TRỌNG: LUÔN LUÔN tháo pin không vô trùng khỏi vỏ vô trùng trước khi sạc pin.

LƯU Ý:

- Sạc lại pin trước khi mỗi lần phẫu thuật, ngay cả khi chúng chưa được sử dụng, để đảm bảo thời gian hoạt động tối đa.
- Chu kỳ sạc mất khoảng 5 đến 90 phút.
- Thời gian chạy dự kiến cho mỗi pin là 2,5 đến 15 phút tùy theo yêu cầu sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin đã được sạc trong vòng 48 giờ qua.
- Bảo quản pin trong bộ sạc cho dù chúng sẽ được duy trì sạc đầy đủ. KHÔNG cất pin vào tay khoan nơi chúng sẽ phóng điện. Việc phóng điện sẽ xảy ra ngay cả khi tay khoan không chạy.

- Sạc pin ở nhiệt độ bình thường trong phòng, khoảng 64 đến 75 °F (18 đến 24°C).
- Tài liệu bảo trì cho thiết bị này chỉ được cung cấp theo yêu cầu cho nhân viên bảo trì được Stryker chấp thuận.
- Để lắp pin đúng cách vào tay khoan, hãy đọc và hiểu các hướng dẫn sử dụng thích hợp của Stryker.
- Để sạc pin đúng cách, hãy đọc và hiểu hướng dẫn sử dụng được cung cấp kèm với bộ sạc pin.
- Để lắp một pin vô trùng vào vỏ vô trùng (REF 6126-120-000), hãy xem Hướng dẫn sử dụng dành cho Bộ dụng cụ pin vô trùng của hệ thống 6 (REF 6126-000-000).

Vệ sinh



CẢNH BÁO: KHÔNG ngâm hoặc khử trùng pin này.

1. Tháo pin không vô trùng ra khỏi vỏ vô trùng.
2. Kiểm tra vỏ pin xem có nứt hoặc hư hỏng hay không. **KHÔNG** sử dụng pin nếu thấy hư hỏng.
THẬN TRỌNG: KHÔNG rửa, xịt hoặc lau chùi pin bằng vải thấm ẩm.
3. Lau pin không vô trùng bằng vải sạch, khô.

Để vệ sinh, xem phần hướng dẫn sử dụng đi kèm với bộ sạc pin.

Bảo quản và Xử lý

THẬN TRỌNG: LUÔN LUÔN bảo quản thiết bị trong giá trị tình trạng môi trường quy định trong suốt thời gian sử dụng. Xem phần Thông số kỹ thuật.

Để đảm bảo tuổi thọ, hiệu suất và tính an toàn của thiết bị này, nên sử dụng vật liệu bao bì ban đầu khi bảo quản hoặc vận chuyển thiết bị này.

Thải bỏ/Tái chế



CẢNH BÁO: LUÔN LUÔN tuân theo các khuyến nghị hiện hành của địa phương và/hoặc quy định về các rủi ro liên quan đến việc tái chế hoặc thải bỏ thiết bị khi kết thúc thời gian sử dụng.

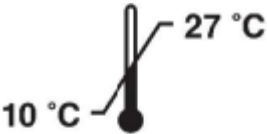
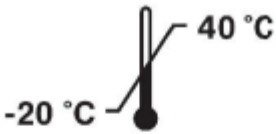
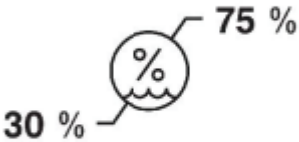
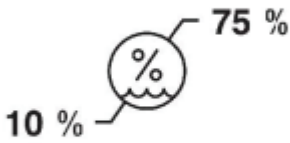


Để tuân thủ Chỉ thị về Pin của Cộng đồng Châu Âu số 2006/66/EC, thiết bị này được thiết kế để loại bỏ pin an toàn khi kết thúc thời gian sử dụng bởi người dùng cuối cùng bằng cách sử dụng hướng dẫn được cung cấp kèm theo sản phẩm. Những bộ phận và pin bị nhiễm bẩn phải được khử nhiễm trước khi mang chúng

đi tái chế.

Thông số kỹ thuật

LƯU Ý: Thông số kỹ thuật mang tính tương đối và có thể thay đổi giữa các thiết bị

Model:	Pin không vô trùng của hệ thống 6 (REF 6126-110-000)	
Kích thước:	53 mm [2.1 inch]	53 mm [2.1 inch]
		66 mm [2.6 inch]
Trọng lượng:	0.36 kg [0.79 lb]	
Điện:	Sạc 9.6 V ==(Dòng điện một chiều)	
Chế độ hoạt động:	Xem thông tin chu kỳ hoạt động theo khuyến cáo đi kèm với mỗi tay khoan	
Bảo vệ đầu vào:	Thiết bị thông thường IPX0	
Điều kiện môi trường:	Hoạt động:	Bảo quản và vận chuyển:
Giới hạn nhiệt độ:		
Giới hạn độ ẩm:		
Giới hạn áp suất khí quyển:	