

stryker[®]

Hộp đựng Khử trùng

REF

R_x ONLY

CE

Giới thiệu

Sổ tay hướng dẫn này cung cấp các thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng các sản phẩm an toàn, hiệu quả và thích hợp. Bạn nên giữ cẩn thận và tham khảo các thông tin trong cuốn sổ tay này trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

Đối tượng sử dụng

Sổ tay hướng dẫn sử dụng này dành cho các nhân viên đào tạo tại chỗ, các kỹ thuật viên thiết bị y sinh học và các kỹ thuật viên xử lý khử trùng / cung cấp dịch vụ.

Quy ước

Các quy ước sau đây được sử dụng trong sổ tay hướng dẫn sử dụng này:

- **CẢNH BÁO:** nêu bật vấn đề liên quan đến an toàn. Bạn phải **LUÔN** tuân thủ các thông tin ở mục này để tránh xảy ra chấn thương cho bệnh nhân và/hoặc các nhân viên y tế.
- **THẬN TRỌNG:** nêu bật vấn đề về an toàn sản phẩm. Bạn phải **LUÔN** tuân thủ các thông tin trong mục này để tránh gây hỏng hóc cho sản phẩm.
- **CHÚ Ý:** bổ sung và/hoặc làm rõ các thông tin.

Thông tin liên hệ

Để thêm thông tin chi tiết bao gồm các thông tin an toàn, khóa đào tạo tại chỗ, các tài liệu hiện có, xin vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của Stryker hoặc gọi cho bộ phận dịch vụ khách hàng của Stryker. Nếu bạn ở một quốc gia không phải Hoa Kỳ, hãy liên hệ với công ty con Stryker gần nhất.

Mục đích sử dụng

Hộp đựng khử trùng Stryker được thiết kế để đựng khay và bảo vệ các dụng cụ y tế trong quá trình khử trùng bằng hơi nước, bảo quản và vận chuyển dụng cụ y tế. Hộp đựng khử trùng này phải được bọc trong một chiếc bao gói khử trùng được công nhận trước khi khử trùng nhằm duy trì vô trùng cho dụng cụ.

Khay Chèn Stryker được thiết kế như một giá đỡ thuận tiện cho các thiết bị y tế có thể tái sử dụng trong quá trình làm sạch tự động và khử trùng bằng hơi nước. Khay Chèn này cũng có thể được đặt trong một hộp cứng và không đòi hỏi phải có bao gói bọc ở bên ngoài.

Chống chỉ định

Không rõ.

Các định nghĩa

Ký hiệu nằm trên thiết bị và /hoặc nhãn dán được chỉ ra trong phần này hoặc trong phần *Định nghĩa các ký hiệu*. Xem phần Định nghĩa ký hiệu đi kèm cùng thiết bị.

KÝ HIỆU

ĐỊNH NGHĨA



Ký hiệu cảnh báo chung

Bộ phận sử dụng kèm theo

Mỗi hộp đựng khử trùng được sử dụng cùng với một mẫu khay chèn riêng. Hãy xem hướng dẫn sử dụng đi kèm với khay chèn thích hợp để biết thêm thông tin chi tiết.

Các chỉ thị an toàn



CẢNH BÁO:


- Trước khi sử dụng thiết bị này, hoặc bất kỳ bộ phận nào tương thích với thiết bị này, hãy đọc và hiểu rõ các hướng dẫn sử dụng được nêu trong cuốn sổ tay này. Nên chú ý đặc biệt đến thông tin an toàn. Làm quen với thiết bị trước khi sử dụng.
 - Chỉ những người được đào tạo và có kinh nghiệm trong việc sử dụng thiết bị y tế này mới được vận hành thiết bị này.
 - Xem sổ tay hướng dẫn sử dụng đi kèm với khay chèn để biết thêm thông tin chi tiết về việc sử dụng thiết bị an toàn và hiệu quả.
 - **KHÔNG** tái sử dụng, tái chế hay đóng gói lại thiết bị được sử dụng một lần.
 - Thiết bị sử dụng một lần có thể không chịu được quy trình tái xử lý hóa học, hơi hóa học, hoặc khử trùng bằng nhiệt độ cao.
 - Đặc điểm thiết kế của thiết bị có thể làm cho việc làm sạch thiết bị gặp khó khăn.
 - Tái sử dụng thiết bị có thể gây ra nguy cơ nhiễm bẩn nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng đến tình trạng nguyên vẹn của thiết bị dẫn đến quá trình hoạt động gặp sự cố.
- Các thông tin quan trọng về sản phẩm có thể bị mất nếu đóng gói lại thiết bị. Việc không tuân thủ các cảnh báo này có thể dẫn đến nhiễm khuẩn hoặc nhiễm khuẩn chéo và gây chấn thương cho bệnh nhân và/hoặc nhân viên y tế.

Hướng dẫn xử lý

Để nắm được các hướng dẫn xử lý chung, hãy xem sổ tay hướng dẫn sử dụng đi kèm thiết bị của bạn.

Đặc điểm


CHÚ Ý: Hình ảnh minh họa hộp đựng có kích thước 3/4 x 6" (150mm) (Số tham chiếu 7102-454-040) và Hệ thống 73 Khay chèn tay nắm (Số tham chiếu 7102-454-010) được đưa ra để tham khảo

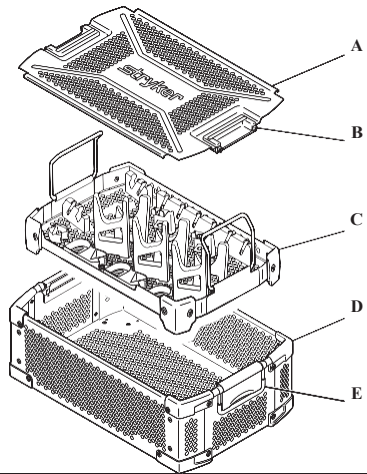

A	Nắp đậy
B	Chốt
C	Khay chèn
D	Hộp đựng
E	Tay cầm

Tháo nắp đậy ra khỏi hộp đựng

Kéo hai chốt về hướng trung tâm của hộp đựng và tháo nắp đậy ra khỏi hộp đựng.

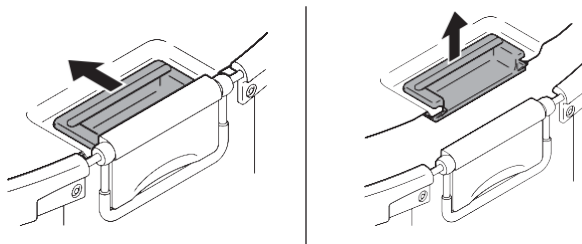

Lắp nắp đậy vào hộp đựng

Đặt nắp đậy lên hộp đựng và gắn hai chốt để giữ nắp đậy lại.

