

Tp. Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 09 năm 2019

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Băng Keo Lụa

- Làm sạch và khô vùng da cần dán trước khi dán. Nếu đã dính dơ sẽ làm giảm khả năng bám dính của băng keo.
- Kéo băng keo nếu cần và cắt (băng cần có chiều dài tối thiểu lớn hơn 2.5cm so với gạc đắp vết thương).
- Để tránh tổn thương, không dán trực tiếp lên các vết thương hở.
- Để dính chặt cần xoa từ trung tâm đến mép miếng dán.
- Bảo quản nơi khô mát với độ ẩm 75% và nhiệt độ 25⁰C

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ



GIÁM ĐỐC
DS. Võ Văn Hùng