

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế:

Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế CMD


Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Zen Tower, số 12 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ngày 13 tháng 09 năm 2019

STT	Đề mục	Nội dung
1	Hướng dẫn sử dụng trang thiết bị y tế	<p>Máy lắc máu ngang và phụ kiện kèm theo</p> <p>Model: CL002</p> <ol style="list-style-type: none">Kết nối nguồn điện.Đặt mẫu vật, ống lắc lên bề mặt đĩa đen xoay.Lựa chọn chế độ: Có thể chọn các chế độ sau:<ul style="list-style-type: none">- TIMER: máy sẽ hoạt động thời gian đặt cho đến khi núm vặn TIMER trở về vạch 0 (đèn nguồn sẽ sáng).- OFF: máy sẽ tắt.- CONT: máy sẽ hoạt động liên tục (đèn nguồn sẽ sáng).Xoay núm điều chỉnh tốc độ theo yêu cầu. <p>Chú ý: Khi chọn chế độ TIMER, cài đặt thời gian hẹn giờ theo yêu cầu (phút) khi kết thúc quá trình hẹn giờ một tiếng chuông sẽ kêu cảnh báo. Khi bạn muốn hẹn 5 phút xoay núm đến 7 phút rồi vặn ngược lại 5 phút.</p>

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Chữ họ tên đầy đủ, chức danh)

 **GIÁM ĐỐC**
Hoàng Văn Mạnh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế:

Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế CMD

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Zen Tower, số 12 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ngày 13 tháng 09 năm 2019

STT	Đề mục	Nội dung
1	Hướng dẫn sử dụng trang thiết bị y tế	<p>Máy lọc máu dạng lặn và phụ kiện kèm theo</p> <p>Model: CL007, CL007N-220</p> <ul style="list-style-type: none">- Kết nối nguồn điện.- Đặt mẫu lên ống lặn đảm bảo các mẫu được đặt trong ống kín.- Bật nguồn máy và thực hiện quá trình lọc- Kết quả sau quá trình lọc- Kết thúc quá trình đo tắt máy.

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)



GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Mạnh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế:

Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế CMD


Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Zen Tower, số 12 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ngày 13 tháng 09 năm 2019

STT	Đề mục	Nội dung
1	Hướng dẫn sử dụng trang thiết bị y tế	Máy lắc máu tại một vị trí và phụ kiện kèm theo Model: CL016 <ul style="list-style-type: none">- Kết nối nguồn điện.- Xoay núm điều chỉnh tốc độ theo tốc độ yêu cầu.- Lấy ống nghiệm cần lắc đặt lên đầu lắc của máy và nhấn xuống đầu trộn để kích hoạt chức năng trộn.- Khi kết thúc quá trình trộn, nâng ống lên và kết thúc quá trình.

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)



GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Mạnh