

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BỘ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN CÓ CAMERA


Mã sản phẩm: VL3R

Model: Clearvue

I. Tháo và lắp

1. Chọn lưỡi CLEARVUE thích hợp theo kích thước miệng bệnh nhân.
2. Lắp lưỡi: định vị điểm kết nối lưỡi cắt với khối gắn tay cầm video và khớp với nhau bằng cách ấn đầu lưỡi dao xuống.
3. Tháo lưỡi: hành động ngược lại của Bước 2 bằng cách đầu lưỡi dao lên để tách kết nối lưỡi cắt khỏi khối gắn tay cầm.

II. Vận hành VLEARVUE

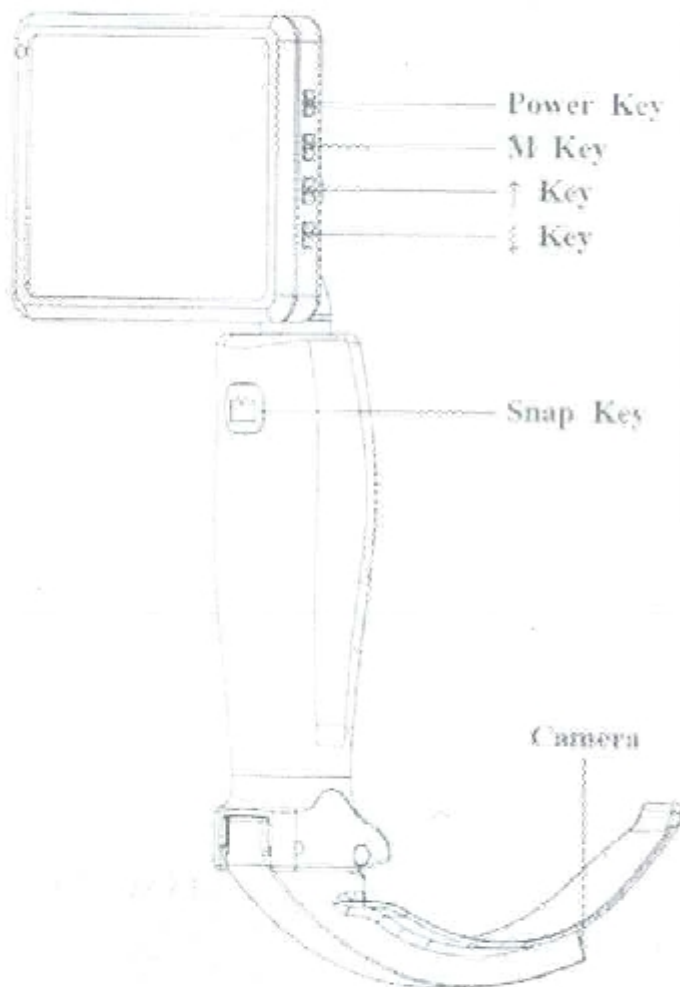

1. Power Key: bật/tắt
2. M Key: phím menu / bật video phím dừng / enter / chọn thời gian
3. ↑ key: hình ảnh và video cuối cùng / tăng giá trị
4. ↓ key: hình ảnh và video tiếp theo / giảm giá trị
5. Snap key: ấn nhanh camera / ấn lâu video / quay lại
6. Camera: để quay phim

1. Để bật nguồn CLEARVUE, nhấn và giữ nút nguồn trong 5 giây. Logo Infinium sẽ xuất hiện trong vài giây và sau đó thiết bị có đầy đủ chức năng. Nếu một lưỡi dao video được lắp phù hợp vào tay cầm, hình ảnh từ camera sẽ xuất hiện trên màn hình. Nếu màn hình dọc lưỡi video không được kết nối! Hãy kiểm tra xem kết nối tay cầm có khớp với đầu lưỡi hay không, hoặc tắt và khởi động lại thiết bị.
2. Khi bật màn hình, ở góc dưới bên trái màn hình sẽ có biểu tượng pin nhỏ biểu thị mức năng lượng của pin lithium sạc bên trong màn hình. Ngày và giờ cũng sẽ được hiển thị.
3. Nếu pin được sạc đầy, biểu tượng pin sẽ sớm biến mất. Nếu pin yếu và cần sạc lại, biểu tượng sẽ vẫn ở trên màn hình cho đến khi thiết bị được sạc lại bằng dây sạc mini-USB bên ngoài, hoặc cuối cùng là hết pin và màn hình sẽ tự tắt.

III. Hướng dẫn vận hành CLEARVUE

CLEARVUE được thiết kế để được sử dụng với kỹ thuật soi thanh quản tiêu chuẩn tương tự như nội soi thanh quản trực tiếp. Vui lòng tham khảo các chuyên viên có trình độ, những người cung cấp đào tạo chuyên môn về kỹ thuật đặt nội khí quản trước khi sử dụng thiết bị này với các đối tượng người. Các hình ảnh và video tinh cho các quy trình đặt nội khí quản và hô hấp có thể được ghi lại và tự động lưu vào thẻ SD bên trong màn hình

1. Khởi động:
 - Vệ sinh: lưỡi và cán nên được vệ sinh và/hoặc khử trùng trước khi sử dụng.
 - Trong khi thành phần điện lưỡi thanh quản tạo ra nhiệt thì thấu kính máy ảnh sẽ giúp xoa mờ; đặc biệt là trong khi điều kiện ẩm áp và ẩm ướt của đường thở.
2. Ghi các ảnh tĩnh:
 - Bấm nhanh phím snap trên tay cầm để chụp ảnh. Khi biểu tượng “@” xuất hiện, hình ảnh sẽ tự động được lưu vào thẻ SD dưới dạng tập tin JPG.
 - NOTE: không thể chụp ảnh và lưu khi đang quay phim.
3. Ghi video:
 - Bấm và giữ (2 giây) phím chụp để bắt đầu ghi. Hành động được ghi nhận bởi một bản ghi nhấp nháy liên tục trên màn hình. Một bộ đếm thời gian ghi cũng sẽ được hiển thị.
 - Nhấn cùng nút lần thứ hai để kết thúc ghi. Tập video sẽ tự động được lưu vào thẻ SD trong một tệp “MP4” định dạng.
4. Xem lại hình ảnh và video:
 - Có thể xem lại cả hình ảnh và vòng lặp video bằng cách nhấn nút menu M để chọn chế độ xem trước hình ảnh và video.
 - Mỗi tệp được xác định riêng bằng dấu ngày / giờ.
5. Video đang chiếu:
 - Nhấn nút menu M để tạm dừng phát video xem lại; nhấn phím ‘snap’ để kết thúc xem lại video.
6. Cài đặt thời gian và ngày:
 - Ấn phím menu “M” và lựa chọn “Time Setting”.
 - Ấn mũi tên lên và xuống để sửa ngày và thời gian.
 - Ấn phím menu “M” để xác nhận thay đổi.

