



CÔNG TY TNHH SX TM THIẾT BỊ NAM ANH
8-8A Lê Lăng, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TÀI LIỆU

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHẨU TRANG Y TẾ

1. Hướng dẫn sử dụng

- Mở khẩu trang, xác định đúng vị trí mũi và cằm.
- Chụp khẩu trang kín mũi và miệng, kéo quai đeo vòng qua tai.
- Điều chỉnh khẩu trang cho ôm kín mặt.
- Thay khẩu trang sau mỗi lần sử dụng.

2. Cảnh báo và thận trọng.

- Chỉ sử dụng 01 lần, không tái sử dụng sau khi giặt.
- Không kéo quai khẩu trang quá mạnh để tránh bị giãn lỏng.
- Một số trường hợp, kính mắt có thể bị mờ khi sử dụng khẩu trang, nên cẩn thận khi lái xe.
- Không sử dụng khi ở gần nguồn lửa hoặc khi xảy ra hỏa hoạn.
- Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
- Trường hợp bị kích ứng da, ngưng sử dụng và đến cơ sở y tế để kiểm tra.

CÔNG TY TNHH SX TM THIẾT BỊ NAM ANH



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Linh Hồng Nguyệt