

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DẦU BÔNG VITOPHAR



THÀNH PHẦN:

- Mật ong, Tinh chất nghệ, Dầu đậu nành.

CÔNG DỤNG:

- Hỗ trợ giảm nhanh đau rát, hạn chế tổn thương, viêm nhiễm da và niêm mạc một cách tối đa khi bị bỏng: Bỏng nước sôi, bỏng dầu mỡ, bỏng điện, bỏng hóa chất, ...
- Giúp chăm sóc, bảo vệ vùng da bị tổn thương khỏi các tác động của vi khuẩn, vi rút hoặc bụi bẩn.
- Hỗ trợ làm se bề mặt vết bỏng, tránh viêm nhiễm. Đồng thời thúc đẩy quá trình liền da, tái tạo da mới, hạn chế để lại vết sẹo.

CÁCH DÙNG:

- Rửa sạch vết thương bằng nước muối sinh lý hoặc nước sạch, chích nước lau khô vết thương, nhỏ trực tiếp một lượng vừa đủ lên vùng da bị bỏng, xoa đều mỗi ngày từ 2 đến 3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Không để dầu dính vào mắt, trong mũi, miệng, môi.
- Không dùng cho người quá mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:

- Lắc đều trước khi sử dụng.
- Trẻ em dùng sản phẩm phải có sự hướng dẫn của người lớn.

ĐÓNG GÓI: Lọ 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 100ml, 500ml. Hộp 01 lọ.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh nắng trực tiếp.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS

SỐ ĐK:

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Sản phẩm của: **CÔNG TY CỔ PHẦN BRITA VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 30/15/4 phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 3576 6386 - Hotline: 0932 380 966

Website: <http://britavietnam.vn>

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH LIÊM MEDIPHARMA**

Địa chỉ: KM4 QL1, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam