

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**  
**SẢN PHẨM DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI TOCO SEASON**

**1. THÀNH PHẦN**

Sản phẩm Dung dịch vệ sinh mũi TOCO SEASON gồm các thành phần cấu tạo:

1. Bình xịt phun sương dung dịch được làm bằng nhựa PE, cấu tạo gồm 03 bộ phận: Nắp bình, thân bình, ống dẫn.
2. Dung dịch vệ sinh mũi được chứa trong bình xịt phun sương dung dịch với công thức Điều chế cho 100ml thành phẩm:

TT	Thành phần	Khối lượng/100ml
1.	Natri clorid	0,9g
2.	Benzalkonium chlorid	0,005g
3.	Natri Hydrophosphat	0.005g
4.	Dinatri Hydrophosphat	0,005g
5.	Dinatri Edetat	0,005g
6.	Tinh dầu trà	0,005g
7.	Nước tinh khiết vừa đủ	100ml

**2. CÔNG DỤNG**

- Hỗ trợ giúp làm sạch bụi bẩn trong mũi, rửa trôi dịch nhầy, giúp sát khuẩn, kháng viêm, làm sạch ráy tai. Hỗ trợ phòng ngừa và làm giảm các triệu chứng sổ mũi, ngạt mũi, viêm VA, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm tai.
- Giúp khoang mũi thông thoáng, dễ thở, giúp tai sạch sẽ.

**3. CÁCH DÙNG**

- Lắc nhẹ bình xịt, đưa nhẹ vòi phun vào mũi cho vừa khít, ấn nhanh gọn vòi xịt, dung dịch dạng sương sẽ đi sâu vào khoang mũi. Để dung dịch dư kéo theo chất nhầy chảy ra ngoài và hỉ mũi. Làm lại động tác với mũi bên kia



- Xịt 3-5 lần mỗi bên mũi, 3-6 lần/ ngày, hoặc sử dụng nhiều hơn khi cần thiết
- Sản phẩm an toàn khi sử dụng lâu dài cho trẻ em từ trên 3 tháng tuổi

#### **4. CẢNH BÁO THẬN TRỌNG**

- Trẻ em dùng phải có người lớn hướng dẫn
- Chỉ sử dụng cho trẻ em từ trên 03 tháng tuổi
- Đôi khi việc xịt mũi có thể gây xót, rát mũi, tai.

#### **5. CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

- Người dùng quá mẫn cảm với các thành phần của dung dịch vệ sinh mũi.

#### **6. BẢO QUẢN**

- Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nguồn nhiệt.
- Sau khi sử dụng đậy kín nắp tránh làm nhiễm bẩn đầu xịt.
- Không tái sử dụng chai xịt và đầu xịt.

### **CÔNG TY TNHH TOPHACO VIỆT NAM**

**Địa chỉ:** Số 69, lô F3, khu đô thị mới Đại Kim Định Công, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại: 0902273787

**Sản xuất tại:** Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Dược phẩm Hồng Phát  
Thôn Thăng Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

